

DE



**MEHRSPRACHIGE
HANDBÜCHER**



BENUTZERHANDBUCH AUFRICHTER MIT STANDFUSS

MOBIACARE[®]
M E D I C A L E Q U I P M E N T

REF: 0808195

CE

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der Betaufrichter ist hauptsächlich für bettlägerige Personen bestimmt, die Hilfe benötigen, um aus der liegenden in die sitzende Position zu wechseln. Er wird als optionales Zubehör des Pflege- oder Krankenhausbetts separat angeboten und ist nur zur Verwendung im Innenbereich bestimmt.

Es wird empfohlen, den Aufrichter hinter der Kopfstütze und nicht an den Seiten des Betts aufzustellen.

Für die Befestigung des Produkts an der Wand oder am Bett ist kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

Vorsicht:

Der Aufrichter ist nicht für alle Benutzer geeignet. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Therapeuten beraten.

Allgemeine Warnhinweise:

- Wenn Sie dieses Handbuch nicht lesen, sollten Sie dieses Produkt bzw. ein anderes verfügbares Teil nicht verwenden.
- Sollten Sie die Verwendung bzw. die Vorsichtsmaßnahmen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder die zuständige technische Fachkraft, bevor Sie das Produkt verwenden, da es anderenfalls zu Schäden kommen kann.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern.
- Lassen Sie Vorsicht walten, wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten, und lassen Sie die Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung.

Vor der Verwendung:

1. Prüfen Sie, ob der Rahmen beschädigt ist, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. (Der Rahmen weist keine Risse oder Brüche auf)
2. Prüfen Sie, ob das Produkt richtig montiert ist.
3. Achten Sie auf die Fixierung der Drehknöpfe und Schrauben.
4. Stellen Sie sicher, dass die Bodenfläche, auf der das Produkt aufliegt, eben ist.
5. Führen Sie Einstellarbeiten ohne Belastung durch.
6. Unterstützen Sie den Benutzer immer während der Bedienung des Produkts.

Wartung & Reinigung:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch.
- Schmutz, Öl oder Ablagerungen müssen von der Produktoberfläche entfernt werden.
- Verwenden Sie nur ein Tuch und milde Seife auf den zu reinigenden Oberflächen.
- Verwenden Sie dann ein sauberes Tuch, um alle Teile gut zu trocknen, bevor Sie das Produkt verwenden. Lassen Sie das Produkt nicht nass stehen.
- Wenn Sie das Produkt desinfizieren müssen, verwenden Sie ein handelsübliches, mildes Desinfektionsmittel.



VORSICHT (!):

- Im Falle einer Beschädigung oder Fehlfunktion Ihres Produktes benutzen Sie das Produkt NICHT und wenden Sie sich bitte an einen autorisierten und geschulten Vertreter.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch angegeben sind.
- Die MOBIAC AG übernimmt keinerlei Verantwortung für Folgen, die sich aufgrund einer falschen Verwendung dieses Produkts bzw. aufgrund einer nicht genehmigten Veränderung des Rahmens des Produkts ergeben.
- Die MOBIAC AG behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Abweichungen von $\pm 3\%$ bei den Abmessungen der Produkte möglich.



Umweltschutz:

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Produkt ersetzt werden muss oder nicht mehr für Sie geeignet ist, denken Sie an die Umwelt:

- 1) Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Hausmüll (darauf weist auch das abgebildete Recycling-Symbol hin).
- 2) Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, die Ihnen die Recyclingzentren nennen werden, bei denen Ihr Produkt zu entsorgen ist.
- 3) Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Produkts trägt zum Schutz der Umwelt und zum Recycling der Produktbestandteile bei.

Konformitätserklärung:

Wir tragen die alleinige Verantwortung für die Feststellung, dass die in dieser Erklärung genannten Medizinprodukte in die Klasse mit geringem Risiko (Klasse I) einzustufen sind und den Anforderungen der Verordnung 745/2017 der Europäischen Union und gegebenenfalls den genannten Normen und Gesetzen entsprechen.

Meldung von Vorfällen:

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ereignet, muss dem Hersteller und einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem sich der Benutzer und/oder Patient aufhält.

Gewährleistung:

Für das Produkt gilt eine Gewährleistungsfrist von einem (1) Jahr ab dem Kaufdatum.

Die Gewährleistung deckt Herstellungsfehler ab und gilt **NICHT** für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung, Modifikation, Überbeanspruchung oder Nichteinhaltung der Betriebsanleitung des Produkts entstehen. Sie deckt zudem **KEINE** Teile ab, die während des Gebrauchs oder mit der Zeit verschleifen können.

Schäden oder Defekte, die durch Naturkatastrophen, Wartung oder Reparatur durch Unbefugte, Lieferprobleme (sofern zutreffend) oder Spediteure verursacht wurden, sind nicht von der Gewährleistung gedeckt.

Gewährleistungsformular:

Angaben zum Käufer

Name:

Kaufdatum:S/N.....

LOT:.....Telefonnummer:

Angaben zum Wiederverkäufer

Name:.....

Adresse:.....

Telefonnummer:

Stempel des Wiederverkäufers



MOBIAK S.A.

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com


February 25



0808195

Aufrichter mit Standfuß

<i>Rahmen</i>	Stahl
<i>Farbe</i>	Λευκό Weiß
<i>Verpackungsabmessungen (L x B x H)</i>	129 x 43 x 27 cm
<i>Höhe ab Boden</i>	174 cm
<i>Breite des Standfußes</i>	106 cm
<i>Länge des Standfußes mit Rollen</i>	135 cm
<i>Max. Belastung</i>	136 kg
<i>Gewicht des Produkts</i>	23 kg
0810573)	Mit Kunststoffgriff (Ersatzteilcode: 0810573)

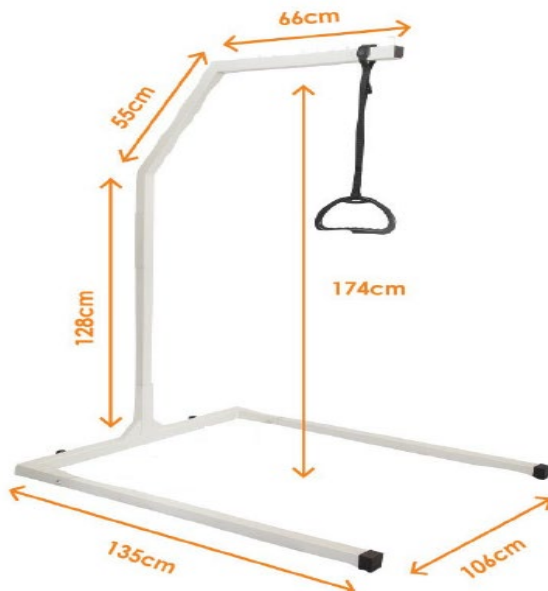

Das Verzeichnis der Montageteile des Aufrichters finden Sie in Abbildung 1 unten:

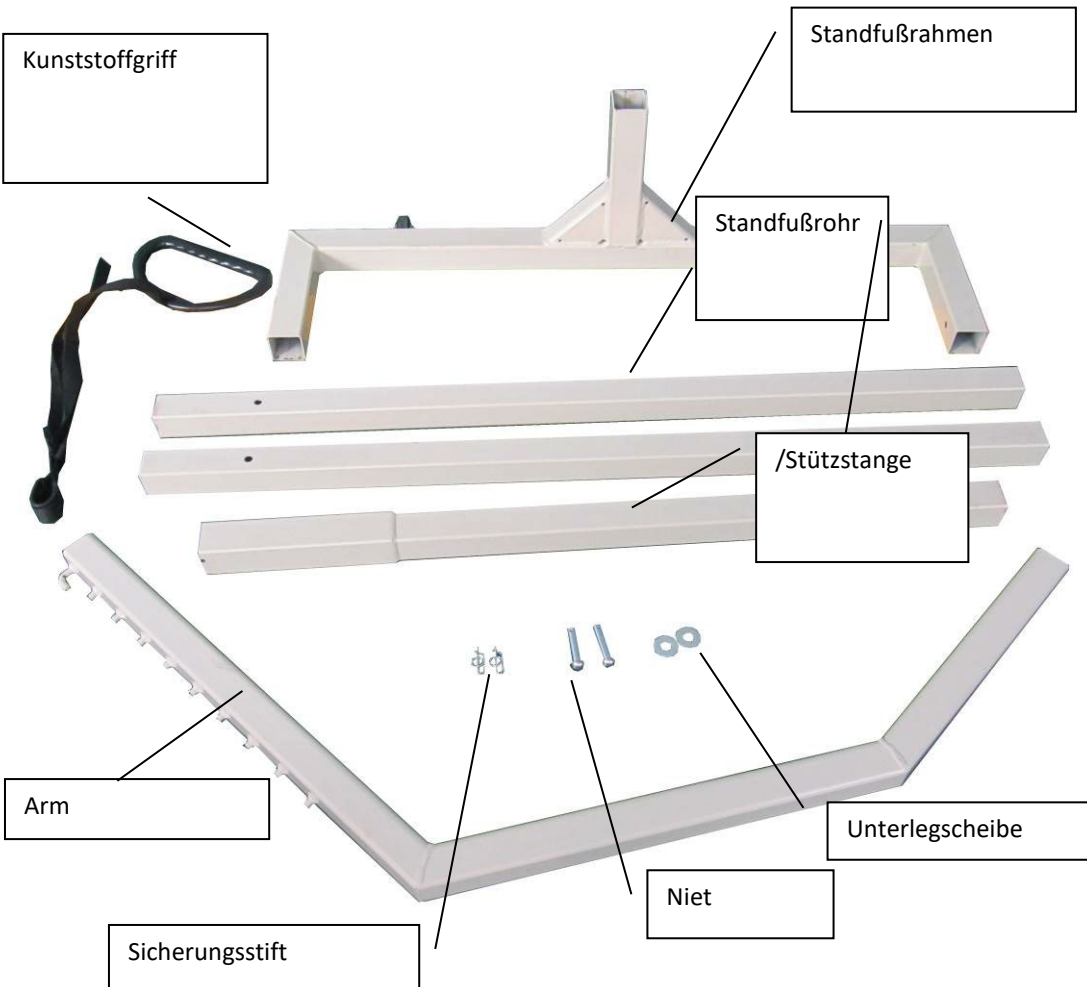


Abbildung 1

1. Setzen Sie das Standfußrohr in die Bohrungen am Standfußrahmen ein, richten Sie es an der Nietbohrung aus und setzen Sie den Niet mit der Unterlegscheibe und dem Sicherungsstift wie in Abbildung 2 gezeigt ein.

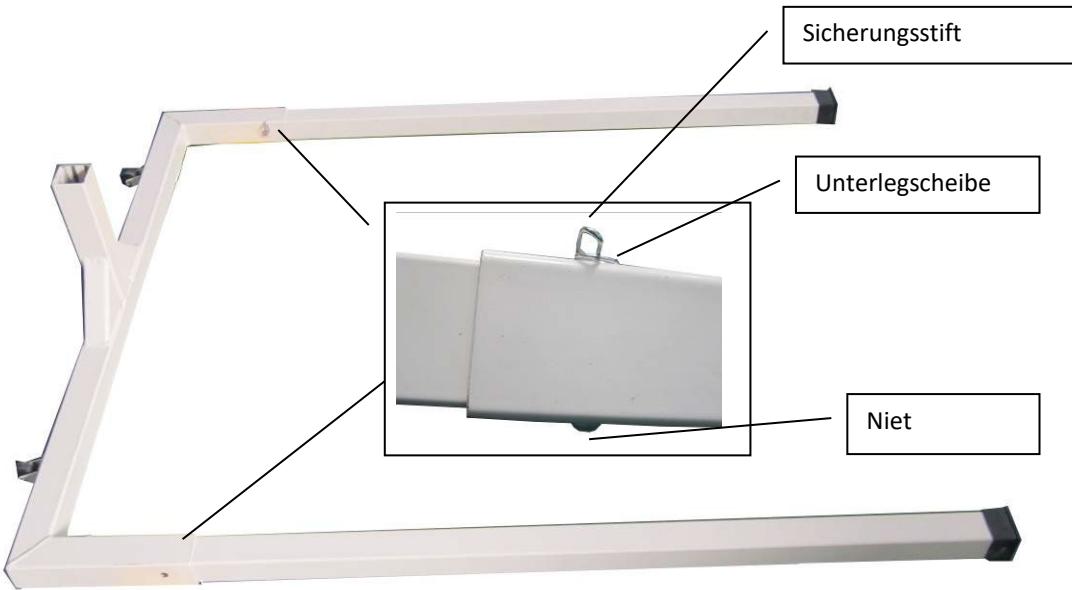


Abbildung 2

2. Bringen Sie die Stützstange wie in Abbildung 3 gezeigt an.



Abbildung 3

3. Bringen Sie den Arm wie in Abbildung 4 gezeigt an.



Abbildung 4

4. Hängen Sie den Kunststoffgriff wie in Abbildung 5 gezeigt auf.





















Abbildung 5

5. Der Standfußrahmen verfügt über 2 Rollen, mit denen er sich bewegen lässt. Neigen Sie den Aufrichter leicht, um sicherzustellen, dass die Rollen den Boden berühren, und drücken Sie ihn wie in Abbildung 6 gezeigt sanft nach vorne, um ihn zu bewegen.



Abbildung 6

Beschreibung der Symbole auf dem Etikett, Masterkarton und/oder Benutzerhandbuch

	Medizinprodukt		CE-Kennzeichnung
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Produktnummer		Gebrauchsanweisung lesen
	Seriennummer		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Lotnummer		Packstückorientierung oben
	Einmalige Produktkennung		Von Sonnenlicht schützen
	Vor Nässe schützen		Stapelhöhe
	Vorsichtig handhaben		Zerbrechlich
	Nur zur Verwendung im Innenbereich		Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte