



DE



BENUTZERHANDBUCH: [ROLLSTUHL GEMINI](#)

0811302

0811302B

0811303

0811303B

0811307

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese Rollstühle wurden für körperlich oder geistig behinderte Menschen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt.



0811302, 0811303



0811302B, 0811303B



0811307



With foldable backrest
0811302,0811303,0811307

SPEZIFIKATIONEN





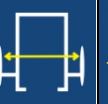






RAHMEN	Stahl – klappbar
FARBE	Silber oder Blau
SITZ-RÜCKENLEHNE	Stoff mit Innenbezug
ARMLEHNE	Zusammenklappbar
FUSSSTÜTZE	Einklappbar, einstellbare Länge, drehbar
HINTERRÄDER	12" Massiv
VORDERRÄDER	8" x 2" Kompakt (200 x 50 mm)

0811302, 0811303	Doppelte gekreuzte Stützstrebe
0811302B, 0811303B, 0811307	Einzelne Traverse

Zubehör (optional):

1. Bremsen für den Betreuer Ref.-Nr.: 0811399
2. Anti-Kipp-Räder Ref.-Nr.: 0811357
3. Höhenverstellbare Fußstütze Ref.-Nr.: 0811358 rechts & 0811359 links
4. Bezug für Sitz und Rückenlehne aus Leder Ref.-Nr.: 0811361 (43 cm) & 0811362 (46 cm)

ABMESSUNGEN

												BRUTTOGEWICHT
0811302	47 cm	46 cm	40 cm	46 cm	60 cm	88 cm	96,5 cm	50,5 cm	12"8"	130 kg	17 kg	19,5 kg
0811303	44 cm	43 cm	40 cm	46 cm	57 cm	88 cm	96,5 cm	50,5 cm	12"8"	130 kg	16,5 kg	19 kg
0811307	41 cm	40 cm	40 cm	46 cm	54 cm	88 cm	96,5 cm	50,5 cm	12"8"	110 kg	15,5 kg	18 kg
0811302B 0811602	47 cm	46 cm	40 cm	45 cm	58 cm	88 cm	92 cm	50,5 cm	12"8"	125 kg	15,5 kg	17,9 kg
0811303B 0811603	44 cm	43 cm	40 cm	45 cm	57 cm	88 cm	92 cm	50,5 cm	12"8"	125 kg	15 kg	17,4 kg

MONTAGE

Informationen entnehmen Sie bitte **ANHANG A**

SYMBOLE

Informationen entnehmen Sie bitte **ANHANG B**

WARTUNG

Durch regelmäßige Befolgung der nachstehenden Anweisungen können Sie die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Rollstuhls verlängern.

➤ WÖCHENTLICH

- Überprüfen Sie den Reifendruck, indem Sie den Angaben auf den Rädern folgen.
- Überprüfen Sie, ob die Zentralschraube des Querarms fest sitzt und sich in gutem Zustand befindet.
- Reinigen Sie den Stoff mit Seifenlauge oder geeigneten Produkten.
- Reinigen Sie die Metallteile des Stuhls mit einem trockenen Tuch oder mit speziellen Produkten für verchromte oder lackierte Oberflächen.
- Prüfen Sie die Radschrauben und stellen Sie sie ggf. nach.
- Überprüfen Sie die Vorder- und Hinterräder auf Schäden.

➤ VIERTELJÄHRLICH

- Prüfen und ggf. einstellen: Radgabeln, Zugräder, Greifreifen.
- Fetten oder ölen Sie alle Teile, die Reibung oder drohendem Verschleiß ausgesetzt sind.
- Schrauben und Muttern festziehen.
- Allgemeine Überprüfung des Zustands des Stuhls und ggf. Reparaturen.

➤ JÄHRLICH

Wir empfehlen einmal jährlich eine vollständige Überprüfung durch einen qualifizierten Dienstleister. Zur körperlichen Sicherheit des Patienten empfehlen wir, den Rollstuhl alle 2 Jahre

vom Hersteller überprüfen zu lassen. Verwenden Sie im Falle einer Reparatur nur Originalersatzteile.

REINIGUNG

Neben Wartung und Inspektion können sowohl der Rahmen als auch der Stoff gründlich gereinigt werden.

- Um sein Aussehen zu bewahren, muss der Stoff regelmäßig gereinigt werden.
- Schmutz lässt sich mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel sowie warmem Wasser entfernen, indem man in Richtung der Struktur wischt.
- Vor dem Trocknen mit klarem Wasser abspülen.
- Den Stoff nicht in den Wäschetrockner geben. Bei starker Verschmutzung sollte die Oberfläche mit einer weichen Bürste gereinigt werden.
- Der Rahmen sollte regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Rollstühle mit Ledersitzen müssen mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und milder Seife. Achten Sie besonders auf das Trocknen der Räder. Es ist gefährlich, den Rollstuhl mit nassen Rädern zu verwenden.

WICHTIG!

Die Konstruktion dieses Rollstuhls ist auf maximale Sicherheit ausgelegt. Für Benutzer kann jedoch eine Gefährdung bestehen, wenn sie ihren Rollstuhl für ungeeignete Zwecke verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen folgende Regeln beachtet werden. Nicht sachgemäße bzw. falsche Einstellungen können das Unfallrisiko erhöhen.

- Tragen Sie stets helle Kleidung, wenn Sie sich an dunklen Orten bewegen, damit Sie leichter für andere sichtbar sind.
- Seien Sie bei Ihrer ersten Fahrt mit diesem Rollstuhl besonders vorsichtig.
- Lernen Sie Ihren Rollstuhl kennen.
- Nutzen Sie Ihren Rollstuhl sowohl auf ebenem Boden als auch auf ansteigendem bzw. abfallendem Gelände.
- Versuchen Sie nicht, Gegenstände zu erreichen, indem Sie diese zwischen Ihren Knien vom Boden aufheben.
- Versuchen Sie nicht, nach Gegenständen zu greifen, wenn Sie sich dabei auf dem Sitz bewegen müssen.
- Nicht auf Straßen oder Autobahnen verwenden.
- Versuchen Sie nicht, auf Flächen mit Wasser, Eis oder Ölfilm bergauf bzw. bergab zu fahren.
- Verwenden Sie ausschließlich Teile, Zubehör oder Adapter, die von MOBIAK genehmigt sind.
- Stehen Sie nicht im Rollstuhl.
- Benutzen Sie die Seitenwand nicht als Plattform beim Ein- oder Aussteigen aus dem Rollstuhl.

Sich auf den Rollstuhl setzen

- Positionieren Sie den Rollstuhl so nah wie möglich bei Ihnen
- Stützen Sie sich mit den Armen auf den Rahmen und senken Sie sich langsam in Richtung Sitz ab
- Aktivieren Sie die Radsperren

Aufstehen aus dem Rollstuhl

- Positionieren Sie den Rollstuhl möglichst nah zu der Sitzgelegenheit zu der Sie sich begeben möchten.
- Verlagern Sie Ihr Körpergewicht auf die Sitzgelegenheit

Beim Bewegen mit dem Rollstuhl nicht vergessen!!

- Benutzen Sie stets Aufzüge und Rampen. Sollten diese nicht vorhanden sein, können Sie mithilfe von zwei Begleitpersonen Ihr Ziel erreichen. Diese müssen den Rollstuhl anheben, indem Sie ihn an stabilen Teilen des Rahmens halten. Ein Rollstuhl sollte niemals angehoben werden, während eine Person darin sitzt. Er sollte nur geschoben werden.
- Falls Schnellspann-Sicherheitsachsen vorhanden sind, ist zu kontrollieren, ob diese richtig eingerastet sind.
- Maximales Benutzergewicht laut den grundlegenden Spezifikationen. Dieser Rollstuhl darf ausschließlich dazu verwendet werden, jeweils eine Person auf dem Sitz zu befördern.
- Jede darüber hinausgehende Nutzung verstößt gegen die Sicherheitsbestimmungen.
- Die Benutzer sollten während der Fahrt in einem beliebigen Transportmittel nicht im Rollstuhl sitzen.
- Während Fahrzeuge sich in Bewegung befinden, müssen unbesetzte Rollstühle durch geeignete Maßnahmen gesichert sein. Bei Fahrten durch Pfützen oder auf unebenem Boden, und zwar insbesondere bei geneigtem Untergrund, besteht die Möglichkeit, dass der Rollstuhl kippt.



WARNHINWEIS

Falls in Zusammenhang mit einem der oben genannten Punkte Probleme auftreten sollten, benutzen Sie den Rollstuhl bitte **nicht**, bis diese behoben sind.

- Verwenden Sie das Produkt nicht für Zwecke, die nicht in diesem Handbuch angeführt sind.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Folgen ab, die sich aus unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts ergeben.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung zu ändern.
- Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Therapeuten beraten, um die richtige Einstellung und den richtigen Einsatz des Rollstuhls zu bestimmen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Rollstuhl zu spielen.
- Versuchen Sie nicht, den Rollstuhl an abnehmbaren Teilen anzuheben.
- Halten Sie den verpackten Rollstuhl von Wärmequellen fern.
- Das Setzen in den bzw. Aufstehen aus dem Rollstuhl kann bei entsprechender Beweglichkeit und Oberkörperkraft selbstständig erfolgen.



UMWELTSCHUTZ

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Produkt ersetzt werden muss oder nicht mehr für Sie geeignet ist, denken Sie an den Schutz der Umwelt:

- 1) Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Hausmüll (darauf weist auch das abgebildete Recycling-Symbol hin).
- 2) Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden, die Ihnen die Recyclingzentren nennen werden, bei denen Ihr Produkt zu entsorgen ist.
- 3) Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Produkts trägt sowohl zum Schutz der Umwelt als auch zum Recycling der Produktbestandteile bei.

GEWÄHRLEISTUNG:

Für das Produkt gilt eine Gewährleistungsfrist von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung deckt Herstellungsfehler ab und gilt NICHT für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung, Modifikation, Überbeanspruchung oder Nichteinhaltung der Betriebsanleitung des Produkts entstehen. Sie deckt außerdem NICHT die Teile ab, die sich während der Verwendung oder im Laufe der Zeit abnutzen können, wie etwa die Polsterung, Räder oder Bremsen.

Schäden oder Defekte, die durch Naturkatastrophen, Wartung oder Reparatur durch Unbefugte, Lieferprobleme (sofern zutreffend) oder Spediteure verursacht wurden, sind nicht von der Gewährleistung gedeckt.

Serviceleistungen oder Ersatzteile sind nur dann gedeckt, wenn eine Überprüfung durch eine autorisierte Kundendienststelle oder den Hersteller des Produkts stattgefunden hat. Die Versandkosten für Artikel, die zur Überprüfung übermittelt werden, sind vom Benutzer bzw. Kunden oder vom Händler zu tragen.

GEWÄHRLEISTUNGSFORMULAR

ANGABEN ZUM KÄUFER:			
VOLLSTÄNDIGER NAME:			
KAUFDATUM:		TELEFONNUMMER:	
SERIENNUMMER:			
LOT:			
ANGABEN ZUM HÄNDLER:			
VOLLSTÄNDIGER NAME:			
ADRESSE:			
TELEFONNUMMER:			
ZEICHEN UND UNTERSCHRIFT			

EG Konformitätserklärung

Wir tragen die alleinige Verantwortung für die Feststellung, dass die in dieser Erklärung genannten Medizinprodukte in die Klasse mit geringem Risiko (Klasse I) einzustufen sind und den Anforderungen der Verordnung 745/2017 der Europäischen Union und gegebenenfalls den genannten Normen und Gesetzen entsprechen.

MELDUNG VON VORFÄLLEN:

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ereignet, muss dem Hersteller und einer zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem sich der Benutzer und/oder Patient aufhält.



ANHANG A. MONTAGE

Der Rollstuhl, den Sie in den Händen halten, kann von dem auf den folgenden Fotos abgebildeten Modell abweichen. Das Montageverfahren ist ähnlich.

Zunächst prüfen wir den Inhalt des Pakets. Platzieren Sie den Rollstuhl wie auf der Abbildung gezeigt. Durch einmaliges Drücken der seitlichen Stangen des Sitzes öffnet sich der Rollstuhl und gelangt in den völlig geöffneten Zustand.



Wenn die Rückenlehne angehoben wird, ist ein Klickgeräusch zu hören, welches darauf hinweist, dass diese sich in der korrekten Position befindet.



Halten Sie die Fußstütze mit der Hand fest und platzieren Sie sie wie abgebildet. Der Stift muss durch das Loch geführt werden.



Nach dem Anbringen der Fußstütze.



Verwenden Sie den mitgelieferten Gurt um sicherzustellen, dass die Füße des Patienten ordnungsgemäß platziert sind.



Installation der höhenverstellbaren Fußstütze (optional)

Entfernen Sie den Fußhaltegurt.



Entfernen Sie die Fußstütze



Legen Sie die höhenverstellbare Fußstütze in die dafür vorgesehenen Halterungen ein.



Bringen Sie den Stützarm in die gewünschte Position und fixieren Sie ihn.



Passen Sie die höhenverstellbare Fußstütze je nach gewünschter Position an.



Kippschutzsystem (auf Anfrage)

Falls der Rollstuhl über ein Kippschutzsystem verfügt, entfernen Sie die Kappe von den Rohren an der Unterseite des Rollstuhls.



Setzen Sie die Kippschutzräder ein.





















Installieren Sie den Sicherungstift in den entsprechenden Löchern. Durch Umkehren des Vorgangs können Sie das Kippschutzsystem entfernen.



ANHANG B. SYMBOLE

Beschreibung der Symbole auf dem Etikett, Masterkarton und/oder Benutzerhandbuch

	Medizinprodukt		CE-Kennzeichnung
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Produktnummer		Gebrauchsanweisung lesen
	Seriennummer		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Lotnummer		Packstückorientierung oben
	Einmalige Produktkennung		Von Sonnenlicht schützen
	Vor Nässe schützen		Stapelhöhe
	Vorsichtig handhaben		Zerbrechlich
	Nur zur Verwendung im Innenbereich		Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte