



Artikelnummer 1000021327

ABENA®

Hosen, ABENA Pants, L3, grüner Farbcode, Premium

- ✓ Superweich für optimalen Komfort
- ✓ Sichere Passform durch die hohe Anzahl an Lycra-Fäden
- ✓ Hochleistungsfähiger Saugkern mit Top-Dry-Technologie
- ✓ Unterstützt ein gesundes Hautgleichgewicht
- ✓ 360° Auslaufschutz



Produktbeschreibung

ABENA Pants ist unser Premium-Sortiment an Einweghosen, die wie normale Unterwäsche getragen werden können und deren Absorptionsgrad eine breite Palette von Bedürfnissen abdeckt. Die Produkte sind aus atmungsaktivem und superweichem Material für optimalen Komfort hergestellt. Das Taillenband mit einer hohen Anzahl von Lycra-Fäden bietet einen sicheren und bequemen Sitz und ist damit ideal für einen aktiven Lebensstil. Der leistungsstarke Saugkern mit der Top-Dry-Technologie sorgt für die Unversehrtheit der Haut und eine optimale Hautpflege, indem auch die sensiblen Bereiche angenehm und trocken bleiben. Die Kombination aus Auslaufsperrern (Längs- und Querbarrieren) und Lycrafäden bietet 360 Grad Auslaufschutz. Diese Funktionen helfen, die Haut zu schützen und das natürliche pH-Gleichgewicht der Haut zu erhalten. Der Geruchsbinder (Odor System) neutralisiert unangenehme Gerüche auf ein Minimum. Der Nässeindikator mit Skala (außer Größe XS1) führt den Benutzer und den Pfleger zu dem Produkt mit der richtigen Saugstärke.



Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Hosen
Marke	ABENA
Produktserie	Pants
Größe	L3
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Grüner Farbcode
Material	ECF-Fluff, PE, atmungsaktives, textilähnliches Material (BTBS), Elastan, Vliesstoff, PP, Harz, SAP
Länge/Tiefe	880 mm
Breite	780 mm
Hüftumfang	100-140 cm
Toleranz	+/- 10%
Saugstärke Rothwell	2400 ml
Geschlecht	Unisex
Qualitätsstufe	Premium
Zertifizierungen	CE. Nordischer Schwan. MD. FSC Mix Pulp. UKCA.
CE-Klasse	Klasse I
Produkt- oder Prüfnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlinien, Verordnungen und Gesetze	MDR (EU) 2017/745
PZN Packung	17457175
PZN Karton	17457181

Sicherheitshinweise und Warnungen	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Haltbarkeit	5 Jahre
Anweisungen zur Aufbewahrung	Trocken, bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
Anweisungen zum Entsorgen von Produkten	Kann mit dem normalen Hausmüll getrennt nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
Anweisungen zum Entsorgen von Verpackungen	Kann recycelt oder verbrannt werden.

Anwendungshinweis

Einweghosen für leichte, mittlere und schwere Inkontinenz, die wie normale Unterwäsche getragen werden können. Besonders geeignet für selbständige und aktive Benutzer, aber auch für demente, rheumatische oder gestörte Benutzer. Ziehen Sie die Einweghose wie eine Unterhose an, ohne die Innenseite der Einlage zu berühren. Die Hosenwindel wird nach Gebrauch, zum Produktwechsel seitlich geöffnet bzw. aufgerissen. Wenn beide Seiten der Hose aufgerissen sind, rollen Sie die Hose zusammen, sichern sie es mit dem integrierten Z-Tape (außer XS1) und entsorgen Sie das Produkt. Erkennung der Produktgröße anhand von Farbcodes, Namen und Nummerierungssystemen.

Verpackungsinformationen

Einheit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	EAN
Kart	6 Pckg	75.6 cm	30.1 cm	35.7 cm	5713571000977
Pckg	15 Stck	23 cm	18 cm	22 cm	5713571000960



Das Nordische Umweltzeichen bzw. der „Nordische Schwan“ ist ein offizielles skandinavisches Umweltzeichen. Produkte mit dem Nordischen Umweltzeichen erfüllen strenge Umweltvorschriften in Bezug auf Rohstoffproduktion, Verwendung, Dokumentation und Sicherheit.



FSC® (Forest Stewardship Council) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich weltweit für die Förderung einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung einsetzt. FSC®-zertifizierte Produkte werden aus Rohstoffen aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern und verantwortungsvollen Quellen hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Integrität des Labels wird durch strenge Kontrollmaßnahmen gewährleistet. Wenn Sie sich für FSC®-zertifizierte Produkte entscheiden, leisten Sie einen Beitrag zum Schutz von Wäldern sowie der Menschen und Tiere, die dort beheimatet sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.fsc.org.



Produkte, die mit MD gekennzeichnet sind, gelten als Medizinprodukte.



Das CE-Zeichen garantiert, dass ein Produkt sicher im Gebrauch ist und allen Sicherheitsvorkehrungen entspricht. CE steht für „Conformité Européenne“ (Europäische Konformität) und ist hauptsächlich auf elektronischen Geräten, Sicherheitsausrüstung, Bauprodukten und medizinischen Produkten und Geräten zu finden.



Die UKCA-Kennzeichnung garantiert, dass ein Produkt sicher in der Anwendung ist und alle Sicherheitsvorkehrungen gemäß den Produktnormen und der Gesetzgebung des Vereinigten Königreichs erfüllt.



Auslaufbarrieren im Beinausschnitt und um den absorbierenden Kern verhindern ein Auslaufen und sorgen für eine optimale Passform.



Ihre Garantie, dass unsere Produkte auf Inhaltsstoffe getestet wurden, die möglicherweise Hautreizungen verursachen können. Die Tests wurden von einem unabhängigen Labor durchgeführt.



Der saugstarke Kern stellt mit seiner einzigartigen Struktur ein schnelles Absorbieren des Urins sicher, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Die Neutralisierung von Gerüchen ist ein entscheidender Faktor, um eine diskrete Anwendung sicherzustellen. Die Inkontinenzprodukte von ABENA zeichnen sich durch eine minimale Geruchsentwicklung aus.



Der Nässeindikator ist ein flüssigkeitsempfindlicher Streifen, der die Farbe ändert oder verblasst und dadurch anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss.



Die Oberfläche des 100 % atmungsaktiven Produkts mit Auslaufschutz bleibt dank Top-Dry-Funktion auch nach mehreren Entleerungen der Blase trocken. Dies trägt zum Aufrechterhalt des natürlichen pH-Werts der Haut und somit zu deren Gesundheit bei.



Das Produkt ist für erhöhten Tragekomfort vollständig atmungsaktiv und eignet sich auch für den längeren Einsatz. Beugt Hautreizungen vor.



Die einzigartige Top-Dry-Funktion sorgt für eine schnelle Absorption, sodass die Oberfläche selbst nach mehreren Entleerungen der Blase trocken bleibt.



Das Produkt ist latexfrei.



Tropfensystem, welches die Saugstärke anzeigt. Je mehr Tropfen, desto höher die Absorption. Es umfasst 1 bis 9 Tropfen.



Die Verpackung besteht zu 30% aus PCR-Material, d. h. aus vom Verbraucher bereits verwendeten Kunststoffen. So können wir unseren Plastikmüll reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

