


## 1. Eigenschaften

Die Unterarmgehstütze besteht aus einem robusten Aluminiumbein mit Gummispitze, einem weichen Krückenpolster und einem verstellbaren Handgriff. Dank des großen Einstellbereichs kann die Gehstütze sowohl von kleinen als auch von großen Patienten verwendet werden. Die ergonomische Form und die Universalgröße machen die Krücke bequem in der Anwendung.

- A. Handgriff
- B. Krückenpolster
- C. Handgriffverstellung – Schlösser
- D. Höhenverstellung – obere Verriegelungsbolzen
- E. Höhenverstellung – untere Verriegelungsbolzen
- F. Gummispitze

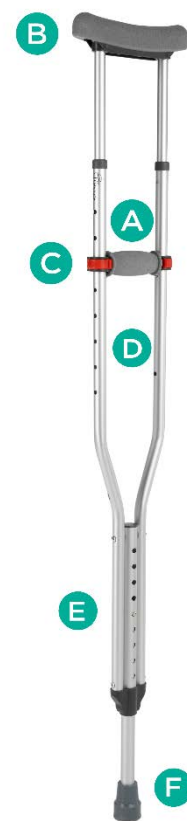

## 2. Anwendung

Die Unterarmgehstütze ist ein Hilfsmittel, das bei Verletzungen der unteren Extremitäten und gleichzeitigen Verletzungen des Handgelenks oder des Ellenbogens verwendet wird. Sie wird auch Patienten empfohlen, die beim Gehen Hilfe und Unterstützung benötigen, um nach Verletzungen der unteren Extremitäten das Gehen wieder zu erlernen. Sie kann auch als Hilfe zum Halten des Gleichgewichts bei schweren Funktionsstörungen der unteren Extremitäten oder des Rumpfes verwendet werden.

**Kontraindikationen:** Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen, fortgeschrittene rheumatische Veränderungen, Verletzungen und

Funktionsstörungen der oberen Extremitäten, die das Stützen auf der Krücke erschweren.

### **3. Einstellung**

- Die Gehstütze sollte individuell auf den Benutzer eingestellt werden, damit die Schultergelenke nicht zu stark angehoben werden und die Griffhöhe sorgt für eine leichte Beugung im Ellenbogengelenk (ca. 30° Winkel).
- Um die Position des Handgriffs anzupassen, entriegeln Sie die beiden roten Verriegelungen und stellen Sie den Handgriff auf die gewünschte Höhe ein. Verriegeln Sie anschließend beide Verriegelungen.
- Um die Länge des oberen Teils der Krücke einzustellen, entriegeln Sie zunächst die beiden roten Griffverriegelungen. Drücken Sie dann gleichzeitig die beiden Metallstifte an der Innenseite der Rohre hinein und wählen Sie die entsprechende Position der Einstelllöcher. Nach der Einstellung verriegeln Sie die beiden Metallstifte erneut (Schrittverstellung in 2,5 cm-Schritten).
- Um die Länge des Unterteils der Gehstütze anzupassen, drücken Sie die Metallstifte auf beiden Seiten des Rohrs hinein und wählen Sie die entsprechende Position der Einstelllöcher. Sobald die Länge eingestellt ist, verriegeln Sie beide Metallstifte wieder (Schritteinstellung in 2,5 cm-Schritten).
- Bei Verwendung von zwei Krücken müssen alle Einstellungen identisch sein (Handgriff, obere und untere Stifte). Handgriffe und Verriegelungsstifte müssen auf gleicher Höhe eingestellt sein. Das Bein der Krücke sollte immer stabil stehen. Die Gummispitze sollte immer einen festen, stabilen Kontakt zum Boden haben.

### **NOTIZ!**

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Krücke stabil ist und die Verriegelungsstifte vollständig durch das Einstelloch der Krücke ragen.
- Es wird empfohlen, zwei Krücken gleichzeitig zu verwenden.
- Bei längerer Benutzung von Unterarmgehstützen kann es zu Verletzungen der Achselnerven kommen - mögliches Auftreten von

sensorischen und motorischen Störungen, Muskelschwäche, Gefühlslosigkeit und in der Folge Muskellähmung).

**HINWEIS!** Bei Zweifeln bezüglich der Fortbewegungstechnik mit Krücken wenden Sie sich an eine Person mit entsprechenden Kenntnissen oder Qualifikationen.

#### **4. Technische Daten**

**Typ:** Dreifachverstellung

**Farbe :** silber

**Maximale Tragkraft:** 136 kg

**Höhe:** 97,5-147,5 cm

**Gewicht der Krücke:** 0,92 kg

#### **5. Hinweise**

**Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.**

#### **6. Reinigung und Wartung**

- Reinigen Sie die Krücke nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln und trocknen Sie sie gründlich ab.
- **Verwenden Sie keine** scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust der Garantierechte führen).
- Es wird empfohlen, die Gummispitze regelmäßig zu überprüfen. Ersetzen Sie abgenutzte Spitzen umgehend.

#### **7. Lager und Transportbedingungen**









Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

#### **8. Garantieinformationen**

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf

unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

## 9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



### Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



01/2025 (III)