

BENUTZERHANDBUCH

Elastische Kniebandage

Produktcode: TGO-C OSK 515



1. Eigenschaften

Die elastische Kniebandage besteht aus nahtlosem orthopädischem Kompressionsgewebe. Die anatomische Form passt sich dem Kniegelenk richtig an, beeinflusst die Kompressionsrichtung und sorgt für eine präzise Stabilisierung. Das moderne und räumliche Gewebe ist luftdurchlässig und leitet übermäßige Wärme und Feuchtigkeit ab, wodurch die Entwicklung einer Bakterienflora eingeschränkt wird.

2. Anwendung

Eine Oberschenkelbandage dient zur Stabilisierung des Gelenks und lindert Schmerzen, die bei körperlichen Belastungen, beispielsweise im Sport, auftreten.

Anwendungsgebiete:

- Schmerzsyndrom der Gelenke durch Überlastungen und Mikroverletzungen,
- Leichte Verdrehungen und Bänderzerrungen,
- Zur Vermeidung von Überlastungen und Verletzungen.

Kontraindikationen:

Nicht verwenden bei:

- Hautabschürfungen,
- Ekzem,
- Wunden und andere Hautverletzungen,
- Nach dem Auftragen von wärmendem Gel oder Salbe,
- Individuelle Kontraindikationen, die vom Arzt im Gespräch und bei der körperlichen Untersuchung festgestellt wurden.

3. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Wartung des Produkts, Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Missbrauch.

4. Montageanleitung

- Ziehen Sie die elastische Bandage von unten bis zum Kniegelenk über.

Hinweis! Nur die richtige Größe garantiert eine Schmerzlinderung.

Notiz! Eine langfristige Anwendung kann zu einer Verringerung des Muskeltonus und zu Funktionsstörungen der Gliedmaßen führen.

5. Technische Daten

GRÖSSE	UMFANG DES KNIEGELENKS (CM)
S	33-35
M	35-37
M	37-39
XL	39-41

6. Wartung

- Handwäsche in warmem Wasser. Nicht im Trockner trocknen, chloren, bügeln, bleichen, chemisch reinigen oder im Wäschetrockner trocknen.
- Bei Raumtemperatur und fernab einer intensiven Wärmequelle trocknen.

Hinweis! Wartungsinformationen finden Sie auf dem Materialetikett.

7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025 (III)