

BENUTZERHANDBUCH

Duschstuhl mit Rückenlehne und U-Sitzfläche – werkzeuglos

Produktcode: TGR-R KP-U 3522L



1. Eigenschaften

Der Duschstuhl besteht aus einem Aluminiumrahmen und einer breiten Sitzfläche aus strapazierfähigem PVC. Der Stuhl ist mit höhenverstellbaren Beinen mit rutschfesten Gummikappen und integrierten Griffen ausgestattet, die die Verwendung des Produkts erleichtern. Speziell entwickelte Gummikappen verhindern, dass der Stuhl auf nassen Oberflächen rutscht. Der Stuhl ist zusätzlich mit einem werkzeuglosen System ausgestattet, das die Montage erleichtert.

Das Set beinhaltet: Rückenlehne, Rückenrohre – 2 Stück, Sitz, Basisrohre – 2 Stück, höhenverstellbare Beine – 4 Stück, Befestigungsschrauben (Flügelschrauben) – 9 Stück.

Elemente des Duschstuhls:

- A. Rückenlehne
- B. Rückenlehnenrohre
- C. Sitz
- D. Basisrohre
- E. Höhenverstellung – tf - System
- F. Anti-Rutsch-Spitzen



2. Anwendung

Der Duschstuhl ist ein Hilfsmittel, das dem Benutzer bei der Durchführung hygienischer Tätigkeiten hilft. Der Stuhl wird für Personen

mit eingeschränkter Mobilität empfohlen, die die selbstständige Durchführung von Aktivitäten des täglichen Lebens verhindern oder behindern. Der Stuhl kann in der Dusche, in der Badewanne, in Badezimmern und anderen feuchten Räumen zu Hause und in Krankenhäusern verwendet werden.

3. Montage

MONTAGE

Schritt 1. Legen Sie den Sitz verkehrt herum auf eine flache Oberfläche.

Schritt 2. Befestigen Sie gekreuzte Basisrohre mit Sitz in der Mitte mit einer Schraube mit Unterlegscheibe.

Schritt 3. Basisrohre mit Beinen verbinden.

Schritt 4. Rückenlehnenrohre an Basisrohre schrauben mittels vier Flügelschrauben mit Unterlegscheiben.

Schritt 5. Duschstuhl mit festen Sitz- und Rückenrohren auf die Beine setzen und die Rückenlehne mit vier Flügelschrauben mit Unterlegscheiben festschrauben.

HÖHENVERSTELLUNG

- Um die Höhe des Duschstuhls einzustellen, drücken Sie den Metallstift, wählen Sie die entsprechende Beinhöhe und fixieren Sie die Position der Rohre zueinander mithilfe des Metallstifts. Die Beine sind in 2,5-cm-Schritten einstellbar.

Hinweis! Die Stifte müssen in jedem Bein auf der gleichen Höhe angebracht sein.

4. Technische Daten

Breite	48 cm
Tiefe	40 cm
Sitzhöhe	35-52 cm
Gesamt Höhe	70-87 cm
Sitzmaße	48 x 31 cm

Gewicht	2,8 kg
Maximale Kapazität	110

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Duschstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Wartung

- Reinigen Sie den Duschstuhl regelmäßig nur mit Wasser, Schwamm und milden Reinigungsmitteln für Kunststoffe wie Seife. Trocknen Sie ihn gründlich ab.
- **Verwenden Sie** zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel, Scheuermittel, Bleichmittel, Benzin oder Lösungsmittel (dies kann zu Rahmenschäden, sichtbaren Mängeln und in der Folge zum Verlust des Garantieanspruchs führen).
- Überprüfen Sie systematisch:
 - Anziehen der Flügelschrauben
 - Zustand der Verriegelungsbolzen
 - Zustand der Rohre (ggf. Risse)

Es wird empfohlen, die Gummispitzen regelmäßig zu überprüfen. Bei Verschleiß ersetzen Sie die Spitzen durch neue.










7. Lager und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter: www.timago.com.
Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group
Ossowski spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



12/2024 (IV)