

BENUTZERHANDBUCH

Rollstuhl mit Transportfunktion und Haltegriff

Produktcode: MOBIL-TIM PLUS



1. Eigenschaften

Der Rollstuhl besteht aus einem Stahlrahmen. Er verfügt über hochklappbare Armlehnen, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Ein- und Aussteigen erleichtern. Er ist mit 8-Zoll-Hinterrädern und 6-Zoll-Vorderrädern, manuell gesteuerten Bremsen (Hinterräder), einem Sitz mit Rückenlehne, Sicherheitsgurt, Transportgriff und Fußstütze ausgestattet.

Elemente des Rollstuhls:



- 1 Armlehnen
- 2 Bremse Griffe
- 3 Rückenlehne
- 4 Sicherheit Gürtel
- 5 Sicherheit Schnalle
- 6 Transportgriff
- 7 Sitz
- 8 Fußstütze
- 9 Vorderräder 6"
Hinterräder Räder 8"
- 10 Bremsen

Rollstuhl nach Falten:



2. Anwendung

Rollstühle sind für Menschen konzipiert, die Probleme mit der Fortbewegung ohne Hilfe haben, sowie für Patienten mit Funktionsstörungen und eingeschränkter Mobilität. Der Rollstuhl ist nur

für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Der Rollstuhl darf nur mit Hilfe einer Begleitperson verwendet werden. Der Rollstuhl dient als Transportstuhl. Er erleichtert die Fortbewegung im Alltag. Der Rollstuhl wird insbesondere für Menschen empfohlen, die Mobilitätsprobleme haben, die folgende Ursachen haben: Lähmung, Fettleibigkeit oder krankhaftes Untergewicht, Degeneration oder Deformation von Gliedmaßen, Degeneration oder Gelenkverletzungen, Gliedmaßenverletzungen oder Amputationen, Herz- und Kreislauferkrankungen und Durchblutungsstörungen.

3. Montage

Aufklappen/Zusammenklappen des Rollstuhls:

- Halten Sie den Sitzrahmen mit einer Hand und den Rückenlehnenrahmen mit der anderen fest und spreizen Sie sie auseinander, bis sie vollständig ausgeklappt sind. Schließen Sie die Sicherheitsschnalle an der Rückseite. Ziehen Sie die Armlehnen und die Fußstütze nach unten.
- Um den Rollstuhl zusammenzuklappen, wiederholen Sie die Schritte, beginnend mit dem Einklappen der Armlehnen und der Fußstütze, und entriegeln Sie dann die Sicherheitsschnalle. Halten Sie Rückenlehne und Sitzrahmen fest und ziehen Sie sie nach innen, bis sie vollständig zusammengeklappt sind.

KLAPPFUNKTION DER ARMLEHNEN:

- Ziehen Sie die Armlehne mit einer leichten Bewegung nach oben.
- Benutzen Sie die Armlehne nicht als Stütze beim Aufstehen. Wenn Sie Hilfe benötigen, bitten Sie um Hilfe.

BREMSEN

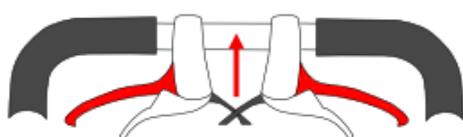


Bild 1

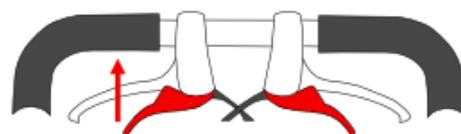


Bild 2

- Um die Räder zu blockieren, ziehen Sie die oberen Handbremsen an (Abbildung 1).
- Um die Räder zu entriegeln, betätigen Sie die untere Handbremse (Bild 2).
- Zum Anhalten leicht die oberen Handbremsen betätigen.

FUSSSTÜTZEN

- Benutzen Sie die Fußplatten beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl nicht als Stütze, da Sturzgefahr besteht.

UMSTEIGEN IN DEN ROLLSTUHL

- Beim Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl, bei der Änderung der Position des Benutzers und beim Aussteigen ist das Feststellen der Bremsen unbedingt erforderlich.
- Beim Platzwechsel sollte sich der Rollstuhl so nah wie möglich am Transferort befinden. Der Rollstuhl sollte das Bett oder einen anderen genutzten Sitz berühren. Wenn der Benutzer seinen Sitz nicht selbständig wechseln kann, setzen Sie ihn in den Rollstuhl um.
- Um eine Instabilität des Rollstuhls zu vermeiden, sollte der Benutzer möglichst tief in der Mitte des Sitzes sitzen.

TRANSPORTGRIFF

- Zum einfachen Transport ist der Rollstuhl mit einem Griff ausgestattet.
- Vor dem Transport den Rollstuhl zusammenklappen und den Griff herausziehen.

HINWEIS! Ziehen Sie den Griff nicht heraus, wenn der Rollstuhl aufgeklappt ist.

4. Technische Details

Gesamt Breite	55 cm
Innenweite	41 cm

Gesamt Tiefe	80 cm
Sitzhöhe vom Boden	48 cm
Gesamt Höhe	103 cm
Sitzmaße	45 x 41 cm
Gewicht	11,00 kg
Maximale Kapazität	136 kg
Rahmenfarbe	Schwarz

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.

7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler,

bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt
	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2024 (III)