

# BRUGSANVISNING

## Topmadras

Produktkode: TOPPER



Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning. Instruksen indeholder information, der er nødvendig for sikker og korrekt brug af produktet, hvordan man vedligeholder og rengør det. Brug af produktet, der ikke er i overensstemmelse med reglerne i brugsanvisningen, kan risikere alvorlige komplikationer. Instruksen skal opbevares på et let tilgængeligt sted.

### 1. Karakteristisk

Madrassen er lavet af polyurethanskum. Den er udstyret med et vaskbart dampgennemtrængeligt betræk med lynlås. Den inkluderer perforering, som tillader luft at flyde frit og giver komfort.

### 2. Anvendelse

Topmadrassen tillader, takket være dens design, konstant adgang til frisk luft, hvilket kombineret med den korrekte trykfordeling og tilpasning af madrassen til brugskroppen forhindrer dannelsen af tryksår og hjælper også med behandlingen af dem, der allerede er dannet.

### 3. Kontraindikationer til brug:

- Brug ikke produktet, der ikke passer til sengerammen.
- Brug ikke produktet andet end det tilsigtede.
- Brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller på en varm overflade. Det kan skade brugeren alvorligt og føre til alvorlig helbredsskade.

### 4. Noter



Producenten påtager sig ikke ansvar for ukorrekt vedligeholdelse af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter og misbrug.

- Huden på tilslutningsstedet skal være ren.
- Det er nødvendigt regelmæssigt at kontrollere tilstanden af patientens hud.
- Brugernes stilling bør ændres regelmæssigt for at undgå dannelse af sår/sår.
- Brug ikke skarpe genstande og udstyr, der kan beskadige dækslet.
- Madrassen skal tilpasses sengens størrelse.
- Oprethold høj hygiejne af madrasbetrækket: rengør og/eller vask.

Hvis produktet ikke længere er egnet til brug, skal det bortskaffes. Før bortskaffelse bør produktet rengøres for at eliminere risikoen for kontaminering.

Hvis der er uønskede symptomer som følge af brugen af udstyret, skal det rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren eller patienten bor.

## 5. Udpakning og montering

- Når du modtager forsendelsen med madrassen, skal du åbne den forsigtigt for ikke at beskadige madrassen.
- Læg madrassen på en flad overflade og vent på, at alle deformationer forårsaget under transporten vender tilbage til sin oprindelige form.
- Madrassen skal monteres på patientens seng for fuldt ud at udfylde dens funktioner.

## 6. Tekniske data

| PARAMETRE | TOPPER |
|-----------|--------|
| Længde    | 200 cm |
| Bredde    | 90 cm  |
| Højde     | 6 cm   |
| Kapacitet | 120 kg |

## 7. Rengøring og vedligeholdelse

- Vask ikke skummadrassen.
- Vask betrækket efter fjernelse af skumindsatsen i et mildt rengøringsmiddel ved temperaturer op til 90°C.
- Betrækket kan steriliseres ved temperaturer op til 120°C.
- Betrækket kan desinficeres med op til 60 % alkoholopløsning.
- Brug ikke blegemiddel eller kemikalier.
- Rengør ikke kemisk.
- Brug ikke kemikalier, der indeholder klor.
- Det anbefales at tørre i udfoldet tilstand.
- Tillad ikke kraftig tilsmudsning.

## 8. Opbevarings- og transportforhold.

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

## 9. Garantioplysninger

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis vilkår er beskrevet i garantikortet, der er tilgængeligt på vores hjemmeside. Kontakt venligst den forhandler, hvor du har købt produktet. Vær venligst opmærksom på, at købsbeviset (kvittering eller faktura) skal opbevares af hensyn til garantien.

### KLAGER ER IKKE UNDERLAGT:

- Mekanisk skade (afskrabninger, skrammer).
- Skader som følge af naturlig brug.
- Fejl som følge af forkert dimensionering af madrassen til sengen.
- Fejl som følge af manglende overholdelse af brugsbetingelserne eller metoden til rengøring og vedligeholdelse.
- Misfarvning af betrækket.
- Komfort ved brug.

## 10. Etiketter

|                                                                                     |                             |                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Referencenummer             |  | Fabrikant                               |
|  | LOT nummer                  |  | Unikke enhedsidentifikationer           |
|  | Serienummer                 |  | Medicinsk udstyr                        |
|  | Note                        |  | Læs venligst instruktionen              |
|  | Brug efter dato             |  | Tilladt opbevaringstemperatur           |
|  | Opbevares på et tørt sted   |  | Beskyt mod sollys                       |
|  | Emballagen er genanvendelig |  | Emballagen skal smides i skraldespanden |



Producenten kontrollerede overholdelse af væsentlige krav til medicinsk udstyr.



**MED-MAT**

**Przemysław Cesarz**

ul. Kochicka 16/1

42-700 Lubliniec, Poland



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



03/2025 (I)