

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nachttisch

Produktcode: TableTIM Multi




1. Eigenschaften

Der Metallrahmen des Nachttisches ist C-förmig, um Mobilität und Bewegung über dem Bett zu gewährleisten.

Der Tisch verfügt über eine Tischplatte, auf der Gegenstände abgelegt werden können, sowie Rollen mit Bremse. Höhe und Winkel der Tischplatte können an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Im Set enthalten sind: Grundgestell, Tischplattengestell, Tischplatte, Montageknopf.

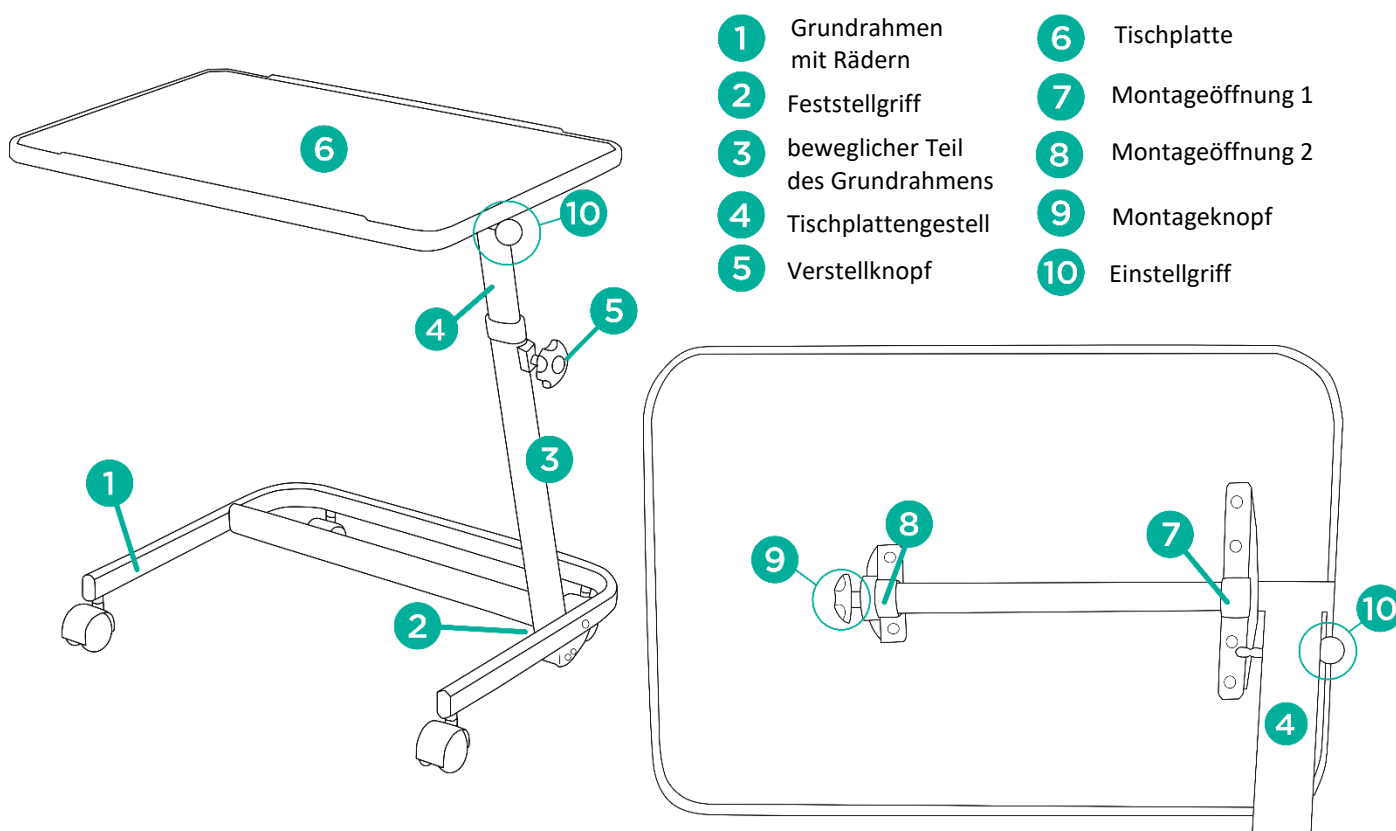

2. Anwendung

Der Nachttisch ist für den Einsatz direkt über dem Bett eines Patienten konzipiert und bietet eine Oberfläche zum Essen, Lesen oder Schreiben im Bett. Das Produkt ist sowohl für die Verwendung während der Pflege in medizinischen Einrichtungen als auch zu Hause konzipiert.

3. Montage und Einstellung

- Für den weiteren Aufbau das Grundgestell (1) auf die Räder stellen und die Feststellbremse feststellen.
- Den Verriegelungsgriff (2) im Grundrahmen ziehen und festhalten, dann den beweglichen Teil des Grundrahmens (3) nach oben heben, bis er sich in der senkrechten Stellung befindet. Der Verriegelungsstift sollte die gewählte Einstellung verriegeln (Klick).
- Den Tischplattenrahmen (4) in die Vierkantbohrung des Grundgestells einstecken und mit dem Einstellknopf (5) in der gewünschten Höhe festziehen - das montierte Tischgestell sollte eine C-Form haben.
- Verbinden Sie die Tischplatte (6) mit dem Tischplattenrahmen (4). Zuerst muss die runde Stange des Rahmens durch das Montageloch 1 (7) und dann durch das Montageloch 2 geführt werden, das näher an der Mitte der Tischplatte liegt (8).
- Nachdem die Welle durch die zweite Montagebohrung gelaufen ist, wird der Montageknopf (9) von außen in die Welle des Tischplattenrahmens eingeschraubt.

Neigung der Tischplatte einstellen

- Um den Winkel der Tischplatte zu verstellen, ziehen und halten Sie den Verstellgriff (10).
- Nach dem Einstellen des richtigen Winkels senken Sie den Verstellgriff ab, sodass der Verstellstift eine der 9 möglichen Verstellmöglichkeiten arretiert.

Einstellen der Neigung des Rahmens

- Um den Winkel des beweglichen Grundrahmens (3) zu verstellen, ziehen und halten Sie den Feststellgriff (2) und stellen Sie anschließend die neue Position des Rahmens ein.
- Nach dem Einstellen des richtigen Winkels senken Sie den Feststellgriff ab – der Feststellstift sollte die gewählte Einstellung verriegeln (Klick).

Höhe der Tischplatte einstellen

- Um die Höhe der Tischplatte einzustellen, lösen Sie den Einstellknopf (5).
- Nach dem Einstellen der richtigen Höhe ziehen Sie den Butterfly fest.

Bremsen

- Für die Dauer der Tischnutzung stellen Sie die Radbremsen fest.

4. Technische Daten

Rahmenmaße (Länge x Breite)	58,6 cm x 53,8 cm
Tischplatte Maße	60 x 40 cm
Winkerverstellung der Tischplatte	0° - 90°
Winkerverstellung des Rahmens	72° / 90°
Höhe Einstellung	70 – 93 cm
Gewicht	8,3 kg
Max. Kapazität	10 kg
Räder Durchmesser	2,00"

5. Hinweise

Die Timago International Group übernimmt keine Verantwortung für den unsachgemäßen Gebrauch des Rollstuhls, die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und den Missbrauch.

6. Reinigung und Wartung

Führen Sie regelmäßig die Wartung der Rollstuhlkomponenten durch:

- Die Polsterung und das Kissen können mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch und kaltem oder warmem Wasser ohne Verwendung von Reinigungsmitteln gereinigt werden. Hartnäckige Flecken können mit einem Schwamm entfernt werden. Die Polsterung nicht zu stark einweichen. Von Wärmequellen fernhalten und trocknen.
- Kunststoffelemente sollten mit einem feuchten Tuch und ggf. unter Verwendung geeigneter Reinigungsmittel für Kunststoffelemente gereinigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen des Herstellers und die Sicherheitsmaßnahmen.







7. Lager- und Transportbedingungen

Das Gerät darf nicht direktem Sonnenlicht, Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

8. Garantieinformationen

Für alle von unserem Unternehmen vertriebenen Produkte gilt eine Garantie, deren Bedingungen in der Garantiekarte beschrieben sind, die auf unserer Website verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass für Garantiezwecke der Kaufbeleg (Quittung oder Rechnung) aufbewahrt werden muss.

9. Etiketten

	Referenznummer		Hersteller
	LOT- Nummer		Herstellung Datum
	Seriennummer		Medizinprodukt

	Notiz		Bitte Lesen Sie die Anleitung
	Der Hersteller überprüfte die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte.		

Unser komplettes Produktsortiment ist bei unseren Vertriebspartnern erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.timago.com**.

Danke, dass Sie sich für Timago entschieden haben!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



01/2025(I)