



MOPEDIA®

DE

MA RP505_RP523_RP547_RH547 02 B DA_03-2025

Aluminium-Rollatoren GEBRAUCHSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1. CODES.....	SEITE 3
2. EINFÜHRUNG	SEITE 3
3. VERWENDUNGSZWECK	SEITE 3
4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	SEITE 3
5. WARNUNGEN.....	SEITE 4
5.1 Allgemeine Warnhinweise.....	seite 4
5.2 Warnhinweise zur Verwendung	seite 4
5.3 Stabilitätswarnungen.....	seite 4
5.4 Warnhinweise zur Montage	seite 4
6. VERWENDETE SYMBOLE	SEITE 5
7. VOR JEDER VERWENDUNG.....	SEITE 5
8. MONTAGEANLEITUNG	SEITE 5
8.1 Vor der Montage	seite 5
8.2 Montage und Demontage RP505.....	seite 5
8.2.1 Einstellung der Griffe	seite 5
8.3 Montage des RP523	seite 6
8.3.1 Einstellung des Sitzes.....	seite 6
8.3.2 Einstellung der Griffe	seite 6
8.3.3 Schließen des Rollators.....	seite 6
8.3.4 Sitz	seite 6
8.4 Montage von RP547 und RH547.....	seite 6
8.4.1 Einstellung des Sitzes.....	seite 7
8.4.2 Einstellung der Griffe	seite 7
8.4.3 Sitz	seite 7
9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG	SEITE 7
10. BREMSEN	SEITE 7
10.1 Benutzung der Bremse.....	seite 7
10.2 Bremssperre (Feststellbremse).....	seite 7
11. WARTUNG	SEITE 7
12. REINIGUNG.....	SEITE 8
13. PFLEGE DER RÄDER.....	SEITE 8
14. TECHNISCHE DATEN	SEITE 8
15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN	SEITE 8
16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR.....	SEITE 8
17. GARANTIE	SEITE 9
17.1 Reparaturen.....	seite 9
17.2 Ersatzteile.....	seite 9
17.3 Freistellungsklauseln	seite 9



Medizinprodukt der Klasse I

VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 5. April 2017 über Medizinprodukte

1. CODES

RP505 Aluminium-Rollator für den Innenbereich **SOLE**

RP523 Aluminium-Rollator *ultralight* **GALATEA**

RP547 Aluminium-Rollator mit höhenverstellbarem Sitz **FEBE**

RH547 Aluminium-Rollator **Febe HD**

2. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Aluminium-Rollator aus der Linie MOPEDIA von Moretti S.p.a. entschieden haben.

Die MOPEDIA-Rollatoren von Moretti S.p.a. sind so konzipiert und hergestellt, dass sie alle Ihre Anforderungen an eine praktische, korrekte und sichere Benutzung erfüllen. Diese Anleitung enthält kleine Tipps für den richtigen Umgang mit dem von Ihnen gewählten Produkt und wertvolle Hinweise für Ihre Sicherheit. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vollständig zu lesen, bevor Sie den von Ihnen erworbenen Rollator benutzen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen helfen und Sie richtig beraten kann.

3. VERWENDUNGSZWECK

Dieser Rollator ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gedacht und kann als Hilfsprodukt verwendet werden, um das Gehen zu erleichtern. Der Rollator bietet mehr Stabilität, Halt und Sicherheit beim Gehen. Auf jeden Fall kann er nicht von Personen mit sichtbar schwacher Hand- und/oder Armfunktion und Personen mit Gleichgewichtsproblemen verwendet werden. Wir empfehlen den Einsatz nur auf Flächen, auf denen alle Räder den Boden berühren. Er sollte nicht auf felsigem Gelände oder schiefen Ebenen benutzt werden, da der Rollator instabil sein kann. Das Hilfsprodukt ist nicht für den Transport von Personen oder anderem Material bestimmt.

WARNUNG!



- Die Verwendung des folgenden Produkts für andere als die in dieser Anleitung definierten Zwecke ist verboten.
- Moretti S.p.A. lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch eine andere als die in diesem Handbuch angegebene Verwendung entstehen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und diesem Handbuch vorzunehmen, um dessen Eigenschaften zu verbessern.

4. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

MORETTI S.p.A. erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von MORETTI S.p.A. hergestellten und in Verkehr gebrachten Produkte, die zur Familie ROLLATOR - MOPEDIA gehören, den geltenden Bestimmungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745 vom 5. April 2017 entsprechen. Zu diesem Zweck garantiert und erklärt MORETTI SpA unter seiner alleinigen Verantwortung das Folgende:

1. Die betroffenen Produkte erfüllen die in Anhang I der Verordnung 2017/745 festgelegten allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen, wie in Anhang IV derselben Verordnung vorgeschrieben.
2. Bei den betroffenen Geräten **HANDELT ES SICH NICHT UM MESSGERÄTE.**
3. Die betroffenen Geräte **SIND NICHT FÜR KLINISCHE PRÜFUNGEN VORGESEHEN.**
4. Diese Geräte werden in **NICHT-STERILE-Verpackungen** vermarktet.
5. Es handelt sich um Produkte, die der Klasse I gemäß den Bestimmungen des Anhangs VIII der oben genannten Verordnung zuzuordnen sind.
6. MORETTI SpA bewahrt die technische Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit der Verordnung 2017/745 auf und stellt sie den zuständigen Behörden mindestens 10 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum der letzten Charge zur Verfügung.

Anmerkung: Die vollständigen Produktcodes, die einmalige Registrierungsnummer („SRN“ – Single Registration Number) des Herstellers, die Basis-UDI-DI und etwaige Verweise auf verwendete Normen finden sich in der EU-Konformitätserklärung, die MORETTI SPA ausstellt und über seine Kanäle zur Verfügung stellt.

5. WARNUNGEN

5.1 Allgemeine Warnhinweise

- Installieren oder verwenden Sie das Produkt NICHT, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen nicht verstehen können, konsultieren Sie einen Arzt, einen Einzelhändler oder technisches Personal, bevor Sie Versuchen Sie, das Produkt zu installieren, und vermeiden Sie dabei Schäden oder Verletzungen;
- Der Rollator darf nur von Patienten benutzt werden, deren motorische Fähigkeiten eine risikolose Nutzung gewährleisten;
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten, um die Eignung des Produkts sowie die richtige Einstellung und Benutzung des Rollators zu prüfen;
- Ihr Arzt oder Therapeut sollte Ihnen dabei helfen, die Höhe Ihres Rollators so einzustellen, dass er maximalen Halt bietet, die Bremsen richtig betätigt werden und insgesamt richtig zusammengebaut ist;
- Rollatoren sind nicht für den selbstfahrenden Gebrauch bestimmt;
- Der Anwender und/oder Patient muss alle schwerwiegenden Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.

5.2 Warnhinweise zur Verwendung

1. Achten Sie immer darauf, dass das Bremsseil richtig befestigt ist.
2. Prüfen Sie nach jeder Höheneinstellung, ob die Bremse richtig funktioniert, um eine übermäßige freie Biegung des Kabels zu verhindern.
3. Die Nichtbeachtung dieser einfachen Warnhinweise kann zu Personenschäden führen.
4. Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden. Benutzen Sie den Rollator nicht, um die Treppe hinaufzusteigen!
5. Stützen Sie sich immer auf beide Hanteln, um das Gleichgewicht zu halten.
6. Achten Sie besonders auf nasse, vereiste oder schneebedeckte Oberflächen.
7. Überlasten Sie den Rollator nicht.
8. Verwenden Sie den Rollator-Sitz (sofern vorhanden) nicht zum Transport von Gütern oder Personen; Der Sitz ist für den Sitz des Anwenders bei angezogener Feststellbremse vorgesehen;
9. Um das richtige Gleichgewicht des Rollators und maximale Sicherheit zu gewährleisten, müssen während der Benutzung alle Räder ständig Bodenkontakt haben.
10. Vor der Benutzung des Sitzes muss die Feststellbremse angezogen werden.

N.B. Wenn Sie den Rollator im Stand benutzen, muss die Feststellbremse arretiert sein.

5.3 Stabilitätswarnungen

- Der Rollator unterstützt eine Person mit einem Gewicht von bis zu 136 kg, einschließlich der Last der Tasche.
- Die Tasche/der Korb hat ein Höchstgewicht von 5 kg. Überlasten Sie nicht, um Ungleichgewichte und Kipprisiken zu vermeiden.

5.4 Warnhinweise zur Montage

- Achten Sie nach dem Auf- bzw. Abbau des Rollators darauf, dass die Sitzstütze beidseitig arretiert ist und kontrollieren Sie, ob die Sicherung in der richtigen Position fixiert ist.
- Überprüfen Sie, ob beide Griffstützrohre richtig in die Struktur eingesetzt und mit den Feststeldrehknöpfen gesichert wurden, die mit den entsprechenden Flügelmuttern und Drehknöpfen ohne Bewegung in der Hauptstütze verriegelt sind.
- Hängen Sie nichts an den Rahmen des Rollators, um eine Verformung der Rohre zu vermeiden und seine Stabilität nicht zu beeinträchtigen.

Hinweis: Achten Sie beim Öffnen und Schließen auf die Gefahr des Einklemmens von Fingern und/oder Kleidung.

6. VERWENDETE SYMBOLE



Produktcode



Eindeutige Produktidentifikation



CE-Kennzeichnung



Hersteller



Produktionscharge



Lesen Sie das Handbuch für Anweisungen.



Medizinprodukt



Entsorgungsbedingung



Beladekapazität

DE

7. VOR JEDER VERWENDUNG

Prüfen Sie dies immer, bevor Sie das Gerät benutzen:


- Dass alle Teile des Rollators sicher verriegelt sind;
- Prüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind;
- Stellen Sie sicher, dass der Sitz richtig verriegelt ist (sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie den Sitz weiter nach unten zum Rahmen hin);
- Prüfen Sie, ob die Sitzverriegelungsvorrichtung richtig eingerastet ist;
- Prüfen Sie die korrekte Funktion der normalen Bremse und der Feststellbremse;

8. MONTAGEANLEITUNG

8.1 Vor der Montage

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie, ob es während des Transports beschädigt worden ist. Wenn der Rollator beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den nächsten Händler.

8.2 Montage und Demontage RP505

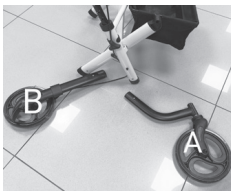

- Öffnen Sie den Rollator und den Korb, bis die Kunststoffflasche einrastet.
- Setzen Sie die Vorderräder A und die Hinterräder B in die entsprechenden Gehäuse ein.
- Legen Sie das durchsichtige Plastiktablett auf den Korb.

Zum Zerlegen und Verschließen führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Knöpfe fest in den Löchern sitzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass der Rollator nicht unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft einklappt. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

8.2.1 Einstellung der Griffe


Um den Griff einzustellen, schrauben Sie die Drehknöpfe ab und entfernen Sie die Kunststoffblöcke auf beiden Seiten. Dann heben oder senken Sie den Griff auf die gewünschte Höhe, indem Sie auf beiden Seiten die gleiche Kraft ausüben; Dann setzen Sie den Kunststoffblock wieder ein und schrauben Sie den Drehknopf an, wobei Sie darauf achten, dass das Loch vorhanden ist.



WARNUNG!

Dieser Rollator erlaubt es nicht, sich auf die vordere Fläche zu setzen, die aus dem Korb und dem Tablett besteht, daher ist es strengstens verboten, sich darauf zu setzen.

8.3 Montage des RP523

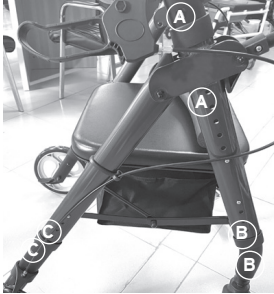

- Stecken Sie die Beine und Griffe in die entsprechenden Schlitzte und achten Sie dabei auf die Zuordnung der Buchstaben auf den Produktteilen.
- Sie die Rückenlehne in die entsprechenden Schlitzte ein, indem Sie auf die seitlichen Stifte drücken.

DE

8.3.1 Einstellung des Sitzes



- Um den Sitz einzustellen, müssen Sie die Vorderräder A einstellen, indem Sie den Stift aus den Löchern entfernen und ihn neu positionieren, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist;
- Für die Hinterräder B drücken Sie die seitlichen Tasten und positionieren Sie das Rad durch deren Auslösen auf die gewünschte Höhe.



WARNUNG!

Stellen Sie die Räder so ein, dass der Sitz immer parallel zum Boden ist.

8.3.2 Einstellung der Griffe

Schrauben Sie die Drehknöpfe ab und entfernen Sie sie aus dem Loch, wählen Sie die gewünschte Höhe und setzen Sie sie wieder in das Loch ein, indem Sie sie einschrauben.



WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Knöpfe fest in den Löchern sitzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass der Rollator nicht unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft einklappt.

8.3.3 Schließen des Rollators

Heben Sie den Metallgriff unter dem Sitz an und ziehen Sie ihn nach oben.

8.3.4 Sitz


Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse fest angezogen ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.



WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Sitzen Sie nicht nur auf einer Seite schiebend.

8.4 Montage von RP547 und RH547

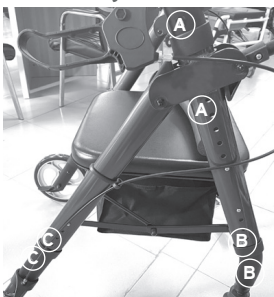

- Setzen Sie Beine und Griffe in die entsprechenden Gehäuse ein, indem die auf den Produktteilen angegebenen Buchstaben richtig gepaart werden.
- Setzen Sie die Rückenlehne in die entsprechenden Schlitzte ein, indem Sie auf die seitlichen Stifte drücken.


WARNUNG!

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, dass der Rollator nicht dazu neigt, unter der Einwirkung einer kleinen seitlichen Kraft zusammenzuklappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bremskabel nicht verdrehen, wenn Sie den Lenker und die Räder verbinden.

8.4.1 Einstellung des Sitzes

Um den Sitz zu verstellen, müssen Sie die Arretierstifte an den Vorder- und Hinterrädern drücken und auf die gewünschte Höhe schieben

8.4.2 Einstellung der Griffe

Drücken Sie die seitlichen Knöpfe und positionieren Sie den Griff in der gewünschten Höhe, indem Sie sie einrasten lassen.

8.4.3 Sitz

Bevor Sie sich hinsetzen, stellen Sie den Rollator auf eine flache, feste Unterlage und arretieren Sie dann die Bremsen. Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse fest angezogen ist und der Rollator in einer stabilen Position steht.


WARNUNG!

Setzen Sie sich hin und verteilen Sie Ihr Gewicht auf den gesamten Sitz. Sitzen Sie nicht nur auf einer Seite schiebend.

9. MODALITÄTEN DER NUTZUNG

- Beginnen Sie mit dem Schieben, wenn Sie mit beiden Händen an den Griffen stehen;
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Rollator benutzen, um die Gefahr des Ausrutschens zu vermeiden;
- Gehen Sie aufrecht mit dem Blick nach vorne, nicht nach unten;
- Schieben Sie den Rollator nicht zu weit vom Körper weg, da dies zu Stürzen und unzureichender Belastung führen kann;
- Benutzen Sie den Rollator nicht zum Überwinden von Stufen, die höher als 20 mm sind;
- Bei der Verwendung des Produkts im Außenbereich sind Gehwege zu bevorzugen, die entsprechend den Vorschriften für die Beseitigung architektonischer Barrieren angemessen vorbereitet sind;
- Um kleine Hindernisse zu überwinden, nutzen Sie, sofern vorhanden, die hinteren Trittbretter, um den vorderen Teil des Rollators anzuheben.

10. BREMSEN

Das einwandfreie Funktionieren der Bremsen hängt von der Abnutzung und dem Schmutz ab, der sich auf den Rädern angesammelt hat. Überprüfen Sie den Zustand der Bremsen und Räder vor jeder Benutzung.

10.1 Benutzung der Bremse

Zum Bremsen des Rollators ziehen Sie die Bremshebel mit den Fingern nach oben, bis der Rollator langsamer wird oder anhält. Um den Rollator weiter zu bewegen, lösen Sie die Bremsgriffe.

10.2 Bremsperre (Feststellbremse)

Drücken Sie mit der Handfläche auf die Bremshebel. Wenn Sie ein „Klicken“ hören, sind die Räder blockiert. Heben Sie die Bremsgriffe an, um sie aus der Stopp-Position zu lösen.


WARNUNG!

Wenn der Anwender stillsteht, müssen die Bremsen blockiert sein.

11. WARTUNG

Die Geräte der Linie MOPEDIA by Moretti S.p.A. werden bei ihrer Markteinführung sorgfältig geprüft und mit dem CE-Zeichen versehen. Zur Sicherheit des Patienten und des Arztes wird empfohlen, die Eignung Ihres Rollators mindestens alle 2 Jahre durch den Hersteller oder ein autorisiertes Labor überprüfen zu lassen. Im Falle von Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden.

Die Lebensdauer des Produkts hängt von Verwendung, Wartung, Lagerung und Reinigung ab.

12. REINIGUNG

Verwenden Sie zur Reinigung der Teile nur ein feuchtes Tuch mit neutralen Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, Metallbürsten oder scheuernde bzw. scharfe Gegenstände, da diese das Produkt beschädigen können.

13. PFLEGE DER RÄDER

1. Reinigen Sie die Räder mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem sauberen Tuch trocken.
2. Schmieren Sie die Räder regelmäßig ab.

14. TECHNISCHE DATEN

Serie SOLE										
Produktcode	RP505									
Tablett	25x39 cm									
Struktur	Aluminium									
Serie GALATEA										
Produktcode	RP523									
Sitzplatz	37x24 cm									
Struktur	Aluminium									
Serie	FEBE					FEBE HD				
Produktcode	RP547					RH547				
Sitzplatz	35x35 cm					60x40 cm				
Struktur	Aluminium									
Abmessungen und Gewichte										
										
RP505	75	86 97	69 Tablett	57	40	95x56x34cm	6,8	20	20	136 kg
RP523	70 80	85 102	54 61	64	47	95x58x33cm	7,4			
RP547	70 80	80 99	50 57	63	47	90x62x39cm	8			
RH547	80	80 100	50 57	70	55	110x70x39cm	10	25	25	180 kg

Die Maße sind in cm angegeben und können um $\pm 0,5$ cm variieren.

* Maximale Grundfläche

15. ALLGEMEINE ENTSORGUNGSBEDINGUNGEN

Entsorgen Sie das Produkt niemals über den normalen Hausmüll. Es wird empfohlen, das Gerät über die kommunalen Umweltinseln für das geplante Recycling der verwendeten Materialien zu entsorgen.

16. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

Ersatzteile und Zubehör finden Sie im Gesamtkatalog von Moretti S.p.A.

17. GARANTIE

Alle Moretti-Produkte werden für einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab dem Verkaufsdatum des Produkts gegen Material- oder Verarbeitungsfehler garantiert, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch, Missbrauch oder Veränderung des Produkts sowie bei Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen. Die korrekte Verwendung des Produkts ist in der Gebrauchsanweisung angegeben.

Moretti haftet nicht für Schäden, Verletzungen oder andere Folgen, die durch die Installation und/oder den Gebrauch des Geräts entstehen, wenn die Anweisungen in den Installations-, Montage- und Gebrauchsanleitungen nicht genau befolgt werden.

Moretti übernimmt keine Garantie für Moretti-Produkte gegen Schäden oder Defekte unter den folgenden Bedingungen: Naturkatastrophen, nicht autorisierte Wartungs- oder Reparaturarbeiten, Schäden aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung (falls zutreffend), Verwendung von Teilen oder Komponenten, die nicht von Moretti geliefert wurden, Nichteinhaltung der Richtlinien und Gebrauchsanweisungen, nicht autorisierte Änderungen, Transportschäden (mit Ausnahme des Originalversands von Moretti) oder Nichteinhaltung der in der Gebrauchsanleitung angegebenen Wartungsarbeiten. Verschleißteile fallen nicht unter diese Garantie, wenn der Schaden auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist.

17.1 Reparaturen

Reparatur im Rahmen der Garantie: Wenn ein Moretti-Produkt während der Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler aufweist, prüft Moretti gemeinsam mit dem Kunden, ob der Produktfehler durch die Garantie abgedeckt ist. Moretti kann nach eigenem Ermessen den Artikel im Rahmen der Garantie ersetzen oder reparieren, entweder bei einem Moretti-Händler oder in den eigenen Räumlichkeiten. Die Arbeitskosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts können von Moretti übernommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Reparatur in den Bereich der Garantie fällt. Durch die Reparatur oder den Austausch wird die Garantie weder erneuert noch verlängert.

Reparatur eines Produkts, das nicht durch die Garantie abgedeckt ist: Ein Produkt, das nicht unter die Garantie fällt, kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den Moretti-Kundendienst zur Reparatur zurückgegeben werden. Arbeits- und Versandkosten im Zusammenhang mit einer Reparatur, die nicht unter die Garantie fällt, gehen vollständig zu Lasten des Kunden bzw. des Händlers. Für Reparaturen an Produkten, die nicht unter die Garantie fallen, gilt eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag, an dem das reparierte Produkt erhalten wurde.

Nicht mangelhafte Produkte: Der Kunde wird benachrichtigt, wenn Moretti nach der Untersuchung und Prüfung eines zurückgesandten Produkts zu dem Schluss kommt, dass das Produkt nicht defekt ist. Das Produkt wird an den Kunden zurückgeschickt und der Kunde ist für die Rücksendekosten verantwortlich.

17.2 Ersatzteile

Originalersatzteile von MORETTI haben eine Garantie von 6 (sechs) Monaten ab dem Tag des Erhalts des Ersatzteils.

17.3 Freistellungsklauseln

Sofern in dieser Garantie nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist und soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Moretti keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen, einschließlich jeglicher Zusicherungen, Garantien oder Bedingungen hinsichtlich der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, Nichtverletzung des Gesetzes und Nichteinmischung. Moretti garantiert nicht, dass die Nutzung des Moretti-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird. Die Dauer der stillschweigenden Garantien, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben können, ist auf die Garantiezeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beschränkt. In einigen Staaten oder Ländern sind Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie oder der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit Verbraucherprodukten nicht zulässig. In solchen Staaten oder Ländern gelten bestimmte Ausschlüsse oder Einschränkungen dieser Garantie möglicherweise nicht für Sie. Diese Garantie kann ohne Vorankündigung geändert werden.

**GARANTIEZERTIFIKAT**

DE

Produkt _____

Kaufdatum _____

Händler _____

Adresse _____

Verkaufsdatum _____

Adresse _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com E-Mail: info@morettispa.com**HERGESTELLT IN P.R.C.**

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com