



BETJENINGSVEJLEDNING

1.074 iTRAVEL CARBON W5905 Elektroniske rejsekørestol



Synshandicappede brugere finder PDF-filerne med udvidede oplysninger om vores produkter på vores website under:

< *www.meyra.com* >.

➔ Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål.

Alternativt kan brugere med synshandicap få en hjælper til at læse teksten i dokumentationsmaterialet højt.

Indhold

De anvendte mærkninger betydning	5
Indledning	5
Modeller	5
Indikationer / kontraindikationer	5
Modtagelse	6
Brug i overensstemmelse med formålet	6
Anvendelse	6
Tilpasning	6
Juridiske bestemmelser	7
Kombination med produkter fra andre producenter	7
Ibrugtagning efter opbevaring	7
Levetid	7
Oversigt	8
Model: iTRAVEL CARBON W5905	8
Betjeningsmodul	9
Brug af elektroniske rejsekørestolen	10
Sikring af elektroniske rejsekørestolen	10
Funktionskontrol	10
Køreegenskaber	10
Bremser	10
Driftsbremse	10
Parkeringsbremse	10
Køre-/skubbefunktion	11
Betjeningsmodulets funktioner	11
Tilslutning af betjeningsmodul	11
Batterispænding	11
Forhåndsindstillet tophastighed	12
Startspærre	12
Joystick	13
Knapper og symboler	14
Første ibrugtagning	15

Klargøring til drift	15
Kontrol inden kørsel	15
Batteriets opladningstilstand	15
Batteriopladning	15
Fodbræt	17
Slå fodpladen op/ned	17
Sædepolstring	17
Rygpolstring	17
Afmontage af rygpolstring	17
Montering af rygpolstring	17
Opbevaringslomme	17
Armlænene	17
Opsvingning af armlæn	17
Drej armlænene ned	17
Støtteruller	18
Støttehjulslængde	18
Sammenklapning / udklapning / manuel transport	18
Sammenklapning	18
Udklapning	18
Manuel transport	18
Batteripakken	18
Udtagning af batteripakken	18
Indsætning af batteripakken	19
Transport af elektronisk rejsekørestol med litium-ion-batterier	19
Transport af litium-ion-batterier	19
Sikkerhedsoplysninger om litium-ion-batterier	19
Sikkerhedssele	20
Flytning og transport	20
På-/af læsning	20
Persontransport i motorkøretøjer	21
Transportsikring	21

Vedligeholdelse	21	Bortskaffelse	30
Servicearbejde	21	Anvisninger til brug for forhandleren	31
Serviceplan	22	Programmering af køreegenskaber	31
Dæk	23	Tekniske data	31
Hjul	23	Rækkevidde	32
Fejl diagnose	24	Køreegenskaber ved forcering af stigninger	32
Fejlvisning ved hjælp af batteriindikatoren	24	Anvendte standarder	32
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	26	Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.074	32
Ledsager	26	Yderligere tekniske data for model 1.074	33
Udstigning fra elektroniske rejsekørestolen	26	Symbolforklaring til vaskeanvisningerne	34
Opsamling af genstande	27	Forklaring til mærkaterne på elektroniske rejsekørestolen	34
Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane	27	Forklaring til symbolerne på typeskiltet	34
Forcering af forhindringer	27	Ansvar/garanti	36
Elektrisk anlæg	28	Kontrol dokumentation	37
Befordring i offentlige transportmidler	28	Ansvars-/garantikupon	38
Kørsel i offentlig trafik	28	Kontrol dokumentation ved overdragelse	38
Rengøring	28		
Behandlet overflade	29		
Desinficering	29		
Reparation	29		
Reservedele	30		
Anvisninger vedrørende længere brugspausen	30		

DE ANVENDTE MÆRKNINGERS BETYDNING

Sikkerhedsanvisninger på farvet baggrund skal altid følges!

- ➔ Dette symbol står for anvisninger og anbefalinger.
- [] Henvisning til et billednummer.
- () Henvisning til et funktionselement i et billede.

INDLEDNING

Læs dette dokument før første ibrugtagning, og ret dig efter det.

Børn og unge bør eventuelt læse dette dokument før første køretur sammen med forældre eller en tilsynsførende eller ledsager.

Brug kun elektroniske rejsekørestolen, hvis du også har forstået den medfølgende dokumentation.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig fortrolig med håndteringen af elektroniske rejsekørestolen samt forebygge uheld.

- ➔ De illustrerede udstyrsvarianter kan afvige fra din model.

Derfor er der også angivet kapitler med optioner, som muligvis ikke er relevante for din individuelle elektroniske rejsekørestol.

Hold dig løbende opdateret vedrørende produktsikkerheden, mulige tilbagekaldelseskampanjer og generelle brugsanvisninger for vores produkter i < infocenter > på vores hjemmeside:

< www.meyra.com >.

MODELLER

Denne betjeningsvejledning gælder for følgende modeller:

Model 1.074 iTRAVEL CARBON W5905

INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER

Søg straks læge ved allergiske reaktioner, rødmen og/eller tryksteder ved brug af elektroniske rejsekørestolen.

For at undgå kontaktallergier anbefaler vi kun at benytte elektroniske rejsekørestolen med tøj på.

Den elektroniske rejsekørestol skal forbedre den uafhængige mobilitet for persongrupper med mobilitetsbegrænsninger, som ikke nødvendigvis skyldes sygdom.

Elektroniske rejsekørestolen må ikke anvendes ved:

- Tab af lemmer på arme og ben, der ikke kan udlignes med proteser.
- manglende siddeevne.
- Forhold, som udelukker en selvstændig brug af styringen.

Den elektroniske rejsekørestol må kun bruges sammen med en ledsager ved:

- Kognitive begrænsninger og mental retardering, som udelukker en selvstændig brug af elektroniske rejsekørestolen.
- Blinde personer og personer med begrænset synsevne, som ikke kan kompenseres ved hjælp af synshjælpemidler eller andre hjælpemidler og som fører til begrænsninger i hverdagen.
- Påvirkning af medicin med negativ indvirkning (drøftelse med læge eller farmaceut).
- kraftige balance- og/eller sanseforstyrrelser.
- Kontrakturer på arme og ben, hvorved en sikker brug af rejsekørestolen ikke er garanteret.

- ➔ Spørg din læge, terapeut eller forhandler vedrørende disse og yderligere risici ved produktet.

MODTAGELSE

Alle produkter underkastes kvalitetskontrol på fabrikken og emballeres i særlige papkasser.

- ➔ Vi vil imidlertid bede dig om at kontrollere elektroniske rejsekørestolen for eventuelle skader, som er optrådt under transporten straks efter modtagelsen – helst mens leverandøreren er til stede.
- ➔ Gem emballagen til elektroniske rejsekørestolen med henblik på evt. senere behov for transport.

BRUG I OVERENSSTEMMELSE MED FORMÅLET

Den elektroniske rejsekørestol skal forbedre den uafhængige mobilitet indendørs og i hjemlige omgivelser (lejligheder, indkøbscentre, klinikker og plejeinstitutioner, hoteller).

ANVENDELSE

Elektroniske rejsekørestolen tjener udelukkende til transport **af en** siddende person. – Den er ikke beregnet til andre former for træk- eller transportbelastninger.

Sørg for, at du til enhver tid kan få fat i hjælp, hvis du kun er mobil i begrænset omfang eller slet ikke.

Elektroniske rejsekørestolen skal bruges på et jævnt, fast underlag og kan bruges på følgende måde:

- til indendørs områder (f.eks. hjem, daginstitution), herunder kortvarig brug på direkte tilstødende, jævne, asfalterede udendørs arealer.
- Udsæt aldrig elektroniske rejsekørestolen for ekstreme temperaturer og skadevoldende miljøforhold som f.eks. stærkt sollys, ekstrem kulde og saltvand.

- Sand og andre smudspartikler kan sætte sig fast i de bevægelige dele og bevirke, at de ikke fungerer.

Nationale forskrifter kan forhindre, at elkørestolen kan medtages i bus, tog og lufttrafik.

- ➔ Forhør dig om mulige begrænsninger hos dit transportselskab.
- ➔ Få afklaret de specifikke transportbetingelser med dit flyselskab inden flyrejsen samt de lovbestemmelser vedrørende lufttransport, som gælder hhv. i dit oprindelsesland og på din feriedestination.

Brug kun elektroniske rejsekørestolen i overensstemmelse med specifikationen og grænseværdierne, som er angivet i kapitel *Tekniske data* på side 31.

TILPASNING

Lad altid kun den autoriserede forhandler udføre tilpasninger og indstillinger.

Elektroniske rejsekørestolen giver tilpasningsmuligheder til individuelle kropsmål. Inden første brug bør din autoriserede forhandler bør foretage en tilpasning af elektroniske rejsekørestolen og instruere dig i elektroniske rejsekørestolens funktioner. I den forbindelse tages der hensyn til brugerens fysiske begrænsninger samt til i hvilke omgivelser elektroniske rejsekørestolen hovedsagligt skal anvendes. Kontrollér inden første brug, at din elektroniske rejsekørestol fungerer upåklageligt.

- ➔ Muligheden for at tilpasse den elektroniske rejsekørestols sædeenhed til forskellige kropsstørrelser sikres via oplysningerne om den forsikrede persons anatomiske data i bestillingsformularen.

Såfremt din forhandler udfører en redigering/opdatering eller væsentlige forandringer af din elektroniske rejsekørestol uden brug af originale reservedele, medfører dette eventuelt, at din elektroniske rejsekørestol bringes i omsætning på ny. Dette betyder, at din forhandler evt. skal foretage nye overensstemmelsesvurderinger og kontroller.

- ➔ Vi anbefaler en regelmæssig kontrol af elektroniske rejsekørestolens tilpasning med henblik på at sikre den optimale forsyning også ved forandringer i brugerens sygdoms-/handicaptilstand på lang sigt. Især for børn og unge anbefales tilpasning hver 6. måned.

LEVETID

Vi antager, at produktet har en forventet gennemsnitlig levetid på 5 år, såfremt produktet anvendes til det tilsigtede formål, og samtlige krav med hensyn til vedligeholdelse og service overholdes. Produktets levetid afhænger af såvel anvendeshyppighed, anvendelsesmiljø samt plejen af produktet. Ved hjælp af reservedele er det muligt at forlænge produktets levetid. Reservedele fås som regel i op til 5 år, efter at produktionen er ophørt.

- ➔ Den oplyste levetid udgør ikke nogen yderligere garanti.

JURIDISKE BESTEMMELSER

Den elektroniske rejsekørestol er ikke godkendt til brug på offentlig vej.

KOMBINATION MED PRODUKTER FRA ANDRE PRODUCENTER

Enhver kombination af din elektroniske rejsekørestol med komponenter, som ikke er leveret af os, udgør generelt en forandring af din elektroniske rejsekørestol. Kontakt os for at høre, om vi har godkendt kombinationen.

IBRUGTAGNING EFTER OPBEVARING

Før elektroniske rejsekørestolen tages i brug igen, skal der altid foretages et komplet eftersyn.

- ➔ De hygiejniske foranstaltninger, der er nødvendige for genanvendelse, skal gennemføres efter en valideret hygiejneplan og skal omfatte desinficering.

Servicevejledningen, som er bestemt til den autoriserede forhandler, informerer om din elektroniske rejsekørestols genbrug og genbrugshyppighed.


OVERSIGHT

Model: iTRAVEL CARBON W5905

Oversigten viser elektroniske rejsekørestolens vigtigste komponenter og betjeningsanordninger.

Pos. Betegnelse

- (1) Ryglæn
- (2) Armlæn
- (3) Betjeningsmodul
- (4) Sædepolstring
- (5) Opbevaringslomme
- (6) Batteriet
- (7) Fodplade
- (8) Svinghjul
- (9) Drivhjul
- (10) Håndtag til skift mellem køre-/skubbe-funktion
- (11) Typeskilt

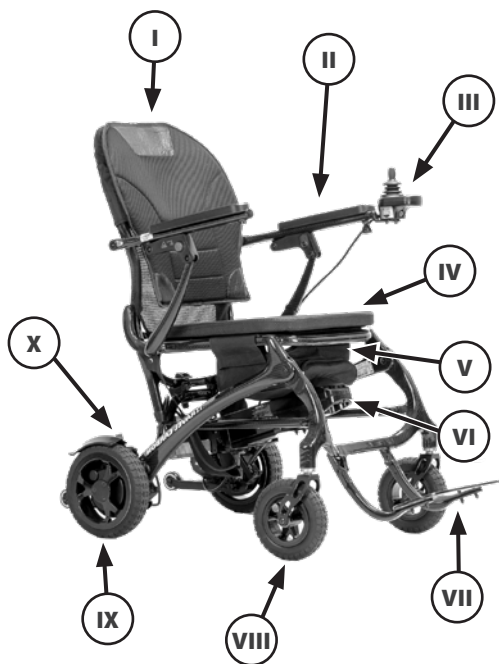


OVERSIGT

Betjeningsmodul

Oversigten viser betjeningsmodulets betjeningsenheder.

Pos. Betegnelse

- (1) Betjeningsmodul
- (2) Batteriladestik
- (3) Joystick
- (4) Kontrolvisning af det indstillede hastighedsforvalg
- (5) Reducering af forvalgt hastighed
- (6) Tænd/sluk betjeningsmodul
- (7) Kontroldisplay for batterikapacitet og fejlvisning
- (8) Horn
- (9) Øgning af forvalgt hastighed

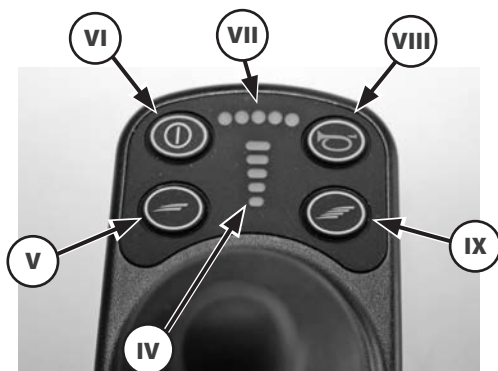

BRUG AF ELEKTRONISKE REJSEKØRESTOLEN

Sikring af elektroniske rejsekørestolen

Elektroniske rejsekørestolen skal sikres på følgende måde, så den ikke triller utilsigtet:

1. Vip skiftearmen til køre-/skubbefunktion på begge sider bagud til kørefunktion.
2. Sluk for betjeningsmodulet.

Funktionskontrol

Inden enhver ibrugtagning skal elektroniske rejsekørestolens funktionsdygtighed og sikkerhed kontrolleres.

- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Kontrol inden kørsel* på side 15.

Køreegenskaber

Hastighed og kørselsretning bestemmes dels af dig selv under kørslen, ved at du bevæger joysticket (køre-/styrehåndtaget) og dels af den indstillede maksimale tophastighed på din elektroniske rejsekørestol.

BREMSE

Brems din elektroniske rejsekørestol forsigtigt og rettidigt. Dette gælder især foran personer og ved kørsel ned ad bakke!

Driftsbremse

Motorene fungerer elektrisk som driftsbremse, og brems elektroniske rejsekørestolen jævnt og uden ryk, indtil den holder stille.

Bremsning af elektroniske rejsekørestolen

Vip joysticket (køre-/styrehåndtaget) langsomt bagud til startpositionen (nulstilling) for at bremse elektroniske rejsekørestolen blidt.

- ➔ Elektroniske rejsekørestolen standser på den kortest mulige strækning, efter at joysticket er sluppet.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremserne virker kun, når skiftearmen til køre-/skubbefunktion for begge motorer er vippet til positionen for kørefunktion. De løsner sig automatisk, når man starter kørslen.

Parkeringsbremserne løsnes manuelt ved at dreje skiftearmen til køre-/skubbefunktion over til skubbefunktion.

Aktivering af bremsen

Elektroniske rejsekørestolen må ikke kunne skubbes med aktiverede bremsen.

Undlad at indstille/skifte til skubbefunktion på nedadgående hældninger.

Forflytning til/fra elektroniske rejsekørestolen må kun ske, når elektroniske rejsekørestolen er slukket og håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion i begge sider står på kørefunktion!

I modsat fald kan en utilsigtet berøring af joysticket sætte elektroniske rejsekørestolen i gang! – Fare for uheld!

For at sætte bremsen fast skal skiftearmen til køre-/skubbefunktion på begge sider trykkes fremad til kørefunktion indtil stopanslaget [3 på side 39<?>].

- ➔ Skiftearmen skal betjenes af en ledsager.

Deaktivering af bremses

For at løsne bremsene skal du på begge sider trykke skiftearmen til køre-/skubbefunktion fremad til skubbefunktion [4 på side 39<?>].

➔ Skiftearmen skal betjenes af en ledsager.

Køre-/skubbefunktion

Elektroniske rejsekørestolen må kun indstilles til skubbefunktion eller skubbes med henblik på rangering eller i nødstilfælde, når den holder stille, dog ikke på strækninger med fald/stigninger.

Husk at skifte tilbage til kørefunktion, når elkøretøjet har været i skubbefunktion. I modsat fald er der risiko for, at din elektroniske rejsekørestolen triller ukontrolleret væk.

Indstilling til skubbefunktion

1. Sluk for betjeningsmodulet, ellers vil kørestolen være svær at skubbe.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Betjeningsmodulets funktioner* på side 11.
2. Løsn bremsene [4 på side 39<?>].
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Deaktivering af bremses* på side 11.
 - ➔ Elektroniske rejsekørestolen kan nu skubbes.

Indstilling til kørefunktion

1. Aktivér bremsene [3 på side 39<?>].
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Aktivering af bremses* på side 10.
2. Tænd for betjeningsmodulet.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Betjeningsmodulets funktioner* på side 11.

Nu kan elektroniske rejsekørestolen køre.

BETJENINGSMODULETS FUNKTIONER

Tilslutning af betjeningsmodul

Joysticket må ikke styres ud under systemtesten.

Tryk på TÆND/SLUK-knappen (6 på side 39<?>) for at tænde betjeningsmodulet. Elektronikken udfører nu en systemtest.

➔ Når batteriindikatoren (7 på side 39<?>) lyser konstant, er elektronikken klar til drift.

Batterispænding

Efter tilkobling af betjeningsmodulet angiver batteriindikatoren (7 på side 39<?>) efter systemtesten batterispændingen. I takt med at batterispændingen falder, lyser færre og færre af de lysende segmenter på batteriindikatoren.

Batteriindikator

Batteriindikatoren (7 på side 39<?>) angiver den eksisterende batterispænding på følgende måde:

Farverne betyder:

Grøn	Batterierne er opladet Ladetilstanden svarer til antallet af de displays, som lyser grønt.
Gul	Efteropladning anbefales.
Rød	Batterierne er tomme, efteroplad straks.

- ➔ En nøjagtig batteriindikator afspejles kun under kørsel på plant underlag.
 - ➔ Ved kørsel op/ned ad bakke kan indikatorerne vise et ukorrekt signal.

Evaluering

Batteridisplaysets nøjagtighed afhænger f.eks. af batteriets temperatur, litium-ion-batteriets alder og dets belastning og har derfor visse begrænsninger.

Den elektroniske rejsekørestols hhv. litium-ion-batteriernes rækkevidde bør testes en gang.

Forhåndsindstillet tophastighed

Fare for uheld ved uhensigtsmæssigt valg af den forhåndsindstillede hastighed!

Når der tændes for betjeningsmodulet, forhåndsindstilles den tophastighed, som var forvalgt, da der sidst blev slukket.

Forhåndsindstilling af tophastighed

Ved at trykke på knapperne (8 på side 39<?>) og (9 på side 39<?>) reduceres eller øges den forvalgte maksimale hastighed gradvist.

Displayet (10 på side 39) viser det valgte hastighedstrin.

Vælg en lav maksimumshastighed til kørsels-situationer, hvor du føler dig usikker (f.eks. kørsel i meget trange rum e.l.).

➔ Den maksimale hastighed skal indstilles afhængigt af de personlige forhold svarende til den pågældende kørsituation!

➔ Ved kørsel på ramper, stigninger, hældninger skal hastigheden tilpasses svarende til hældningen. Overskrid aldrig den tilladte tophastighed. – Fare for uheld!

Hastighedstrin

Den maksimale tophastighed kan forhåndsindstilles til 5 hastighedstrin [11 på side 39].

På hastighedstrin 5 (13 på side 39) er den maksimale hastighed for den elektroniske rejsekørestol 6 km/t.

På hastighedstrin 1 (12 på side 39) er den maks. tophastighed 20 % af maks. mulig hastighed.

Startspærre

For at beskytte elkørestolen mod uautoriseret brug kan den låses med startspærren.

Startspærren er slået til, når:

Et løbende lys vises på displayet til det indstillede forvalgt af hastighed (10 på side 39).

Aktivering af startspærre

1. Mens betjeningsmodulet er tændt, holdes tænd/sluk-tasten (6 på side 39<?>) nede så længe, indtil der høres et lydsignal. Slip tænd/sluk-knappen igen efter det korte lydsignal < beep >.
 2. Vip joysticket (14 på side 39) helt frem (fremadkørsel), og afvent den korte signaltone < beep >.
 3. Vip joysticket helt tilbage (baglænskørsel), og afvent lydsignalet < beep >.
 4. Vip joysticket tilbage til dets nulposition.
- ➔ Når den lange signaltone lyder < beeeep >, er startspærren aktiveret.

Elektronikken spærre for kørefunktionen og slukkes automatisk.

Deaktivering af startspærre

5. Tænd for betjeningsmodulet ved at trykke på tænd/sluk-tasten (6 på side 39<?>).
6. Vip joysticket (14 på side 39) helt frem (fremadkørsel), og afvent den korte signaltone < beep >.
7. Vip joysticket helt tilbage (baglænskørsel), og afvent den korte signaltone < beep >.

8. Vip joysticket tilbage til dets nulposition.
 - ➔ Når det lange lydssignal lyder $< beeeeeep >$, er startspærren deaktiveret.
9. El-kørestolen er klar til brug igen.

Joystick

Først når batteriindikatoren (7 på side 39<?>) lyser konstant, må joysticket bevæges.

Køre- og styrebevægelser

Med joysticket (14 på side 39) accelereres og bremses elektroniske rejsekørestolen. Vip langsomt joysticket i den ønskede køreretning.

Jo længere joysticket vippes væk fra midterpositionen, des hurtigere kører elektroniske rejsekørestolen (op til den indstillede tophastighed).


Hvis joysticket samtidigt vippes ud til siden, drejer kørestolen i en kurve. Hvis joysticket kun vippes ud til siden, drejer elektroniske rejsekørestolen næsten på stedet.

- ➔ Ved baglænskørsel eller kørsel i kurver reduceres hastigheden automatisk.

Bremsning af elektroniske rejsekørestolen

Elektroniske rejsekørestolen standser, når du slipper joysticket.

Flyt langsomt joysticket tilbage til midterpositionen (nulstillingen) for at foretage en afpasset nedbremsning.

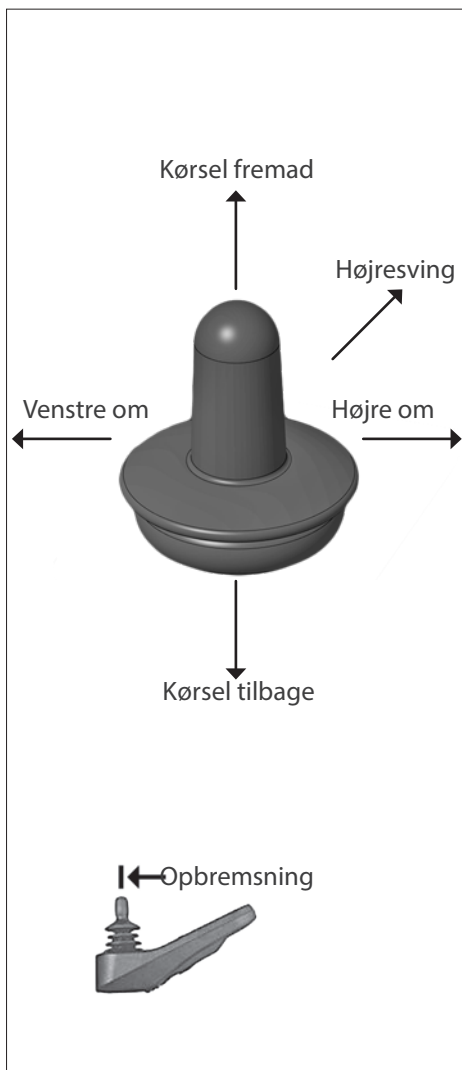

Knapper og symboler

	Tænd/sluk	Slår betjeningsmodulet til eller fra ved betjening. ➔ Ved start udfører elektronikken en systemtest. ➔ Undlad at betjene joysticket i denne tid.
	Horn	Der lyder et akustisk signal, så længe der trykkes på knappen.
	Maks. hastighedsforvalg < Plus >.	Øger ved betjening af knappen den maks. forvalgte hastighed med et trin ad gangen (20 %). ➔ Det anbefales, at < Plus-tasten > kun anvendes, når elektroniske rejsekørestolen står stille. ➔ Trin 1 (20 %) til maks. trin 5 (100 %).
	Maks. hastighedsforvalg < Minus >.	Forringer det maks. hastighedsforvalg med et trin ad gangen (20 %), når der trykkes. ➔ Det anbefales af sikkerhedsmæssige årsager, at < Minus-tasten > kun betjenes, når elektroniske rejsekørestolen står stille. ➔ Trin 5 (100 %) frem til min. trin 1 (20 %).
	Batteriopladningsindikator	I takt med en aftagende batteriopladningstilstand lyser et mindre antal lyssegmenter på batteriopladningsindikatoren. ➔ Blinkende lyssegmenter gør opmærksom på en fejl. Følg anvisningerne i kapitlet <i>Fejldiagnose</i> på side 24.
	Visning af maks. top hastighed	Antallet af lysende dioder (LED) viser den forvalgte maksimale sluthastighed. Hver LED svarer til et trin på 20 %.

FØRSTE IBRUGTAGNING

Gør følgende ved første ibrugtagning:

1. Fold den elektroniske rejsekørestol ud.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Udklapning* på side 18.
2. Fjern kabelbinderen (1 på side 39<?>).
3. Tag batteripakken ud af holderen.
4. Fjern hættten (2 på side 39<?>).
5. Lad batteripakken helt op.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Batteriopladning* på side 15.

KLARGØRING TIL DRIFT

For at gøre elektroniske rejsekørestolen klar til drift, skal følgende anvisninger udføres i den nævnte rækkefølge.

1. Fold den elektroniske rejsekørestol ud.
2. Indstil motorerne til kørefunktion [3 på side 39<?>]. – Husk at aktivere bremsere.
 - ➔ Se kapitlet *Aktivering af bremsere* på side 10.
3. Kontrollér, at foldelåsen er aktiveret.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Sammenklapning / udklapning / manuel transport* på side 18.
4. Træk støttehjulene helt ud.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Støtteruller* på side 18.
5. Tænd for betjeningsmodulet.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Tilslutning af betjeningsmodul* på side 11.
6. Den elektroniske rejsekørestol er klar til brug.

KONTROL INDEN KØRSEL

Inden kørsel bør følgende kontrolleres:

1. Den elektroniske rejsekørestols tekniske tilstand.
 - ➔ Kontrollér f.eks. skrueforbindelserne ved at bevæge de enkelte komponenter såsom armlæn og ryglæn let.
 - ➔ Via en generel visuel inspektion.
2. Støttehjulenes placering.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Støttehjuls længde* på side 18.
3. Batteriets opladningstilstand.
4. Indstillingen på den forvalgte maksimale hastighed.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Forhåndsindstillet tophastighed* på side 12.

Batteriets opladningstilstand

Efter tænding viser batteridisplayet (7 på side 39<?>) batteriets ladetilstand.

- ➔ Den viste værdi afhænger af omgivelsestemperaturen, batteriets alder og belastningstype og skal derfor ses med forsigtighed.
- ➔ Hvis det røde lyssegment i batteridisplayet blinker, skal litium-ion-batteriet omgående lade op.
- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Fejldiagnose* på side 24.
- ➔ Se kapitlet *Batterispænding* på side 11.

Batteriopladning

Undlad at stikke andre genstande end batteriopladningsstikket ind i opladningskontakten. – Fare for kortslutning!

Brug kun den medfølgende litium-oplader til at oplade litium-ion-batteriet.

Garantien er kun fuldt ud gyldig, hvis den batterioplader, vi har leveret, anvendes.

Fremmede opladere kan forårsage alvorlige skader på litium-ion-batteriet.

Oplad litium-ion-batteriet på et rent, tørt og godt ventileret sted.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i nærheden af eller i forbindelse med brændbare væsker eller gasser.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i rum, hvor der kan komme fugt på den elektroniske rejsekørestol og/eller litium-ion-batteriet.

Efterlad aldrig den elektroniske rejsekørestol vedvarende tom, da dette kan beskadige litium-ion-batteriet.

Et fuldstændigt afladet litium-ion-batteri må ikke genoplades.

→ Få litium-ion-batteriet udskiftet af forhandleren.

Oplad kun litium-ion-batteriet inden for det godkendte temperaturområde.

→ Læs mere i kapitel *Yderligere tekniske data for model 1.074* på side 33.

Litium-ion-batteriet bør oplades umiddelbart efter den elektroniske rejsekørestols daglige brug, for at den igen kan yde fuldt ud næste dag.

Alle litium-ion-batterier er udsat for almindelig "selvafledning". Hvis den elektroniske rejsekørestol ikke bruges i længere tid, bør batteripakken fjernes.

→ Se også kapitlet *Anvisninger vedrørende længere brugspauser* på side 30.

→ Litium-ion-batteriet skal være fuldt opladet inden første brug.

→ Litium-ion-batteriets fulde ydelse opnås først efter fire til fem fulde opladninger.

→ Opladningen bør foregå om natten. Det tager ca. 8 timer at oplade batteriet helt.

→ Undgå gnistdannelse på grund af statisk elektricitet (som f.eks. kan skyldes syntetiske gulvbelægninger).

1. Parkér elektroniske rejsekørestolen i sikret tilstand.

→ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elektroniske rejsekørestolen* på side 10.

2. Sæt opladerens netstik i en professionelt installeret stikdåse.

Variant 1:

Sæt opladerens batteriopladningsstik i batteriopladningsstikket (5 på side 39) [15 på side 40].

Variant 2:

Træk batteripakken ud af holderen.

→ Følg anvisningerne i kapitlet *Batteripakken* på side 18.

Drej dækslet til batteriopladningsstikket til siden (17 på side 40). Sæt herefter batteriopladerens stik i opladerbøsningen.

→ Opladningsprocessen kører kun, når batteristikket er sat i.

→ Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast i batteristikket.

3. Opladningsprocessen starter automatisk.

→ Dioden på opladeren lyser blå under opladningsprocessen.

4. Afbryd forbindelsen mellem batteriopladeren og strømnettet, når opladningsprocessen er afsluttet, og træk stikket til batteriopladeren ud af batteriladestikket.

→ En vellykket opladning signaleres ved, at den grønne diode på opladeren lyser.

5. Luk om nødvendigt dækslet til batteriopladningsstikket igen, og sæt batteriet i batteriholderen.

FODBRÆT

Undlad at køre med fodpladen slået op.
– Fare for uheld.

Slå fodpladen op/ned

Ved ind- eller udstigning skal fodbrættet klappes op [18 på side 40].

- ➔ Pas på, at du ikke kommer i klemme mellem fodpladen og sæderammen!

Fjern fødderne fra fodpladen, og klap fodpladen op.

- ➔ Før du begynder at køre, skal du klappe fodpladen ned [19 på side 40] og placere fødderne på fodpladen.

SÆDEPOLSTRING

Sædehøjden kan tilpasses ved hjælp af en passende siddepude.

- ➔ Se kapitlet *Tilpasning* på side 6.

Sædehynden er fastgjort til sikkerhedsselen med en burrelukning [20 på side 40].

RYGPOLSTRING

Afmontering af rygpolstring

For at fjerne den skal du trække rygpolstringen af toppen af ryglænet.

Montering af rygpolstring

For at sætte den på trækkes rygpolstringen over midten af det øverste ryglænrør.

- ➔ Hvis brugeren læner sig op ad rygpolstringen (35 på side 40), skal du være opmærksom på følgende:
- ➔ Trykket mod ryggen skal være jævnt fordelt på rygpolstringen.

OPBEVARINGSLOMME

Redskabstasken er fastgjort ved sæderammen med en burrelukning [27 på side 40].

ARMLÆNENE

Den elektroniske rejsekørestol er udstyret med armlæn med en polstring af PU-skumstof og et hygiejnisk PU-betræk, der er let at desinficere.

Armlænene kan vippes op [22 på side 40].

Opsvingning af armlæn

Du må ikke gribe ind i sakseområdet, når armlænene svinges op. – Fare for at komme i klemme!

For at svinge armlænene op skal du trykke på den pågældende lås.

Tryk låsen (23 på side 40) ind, og sving samtidig armlænet bagud og op [22 på side 40].

Drej armlænene ned

Der må ikke gribes ind i sakseområdet, når armlænet svinges ned. – Fare for at komme i klemme!

Sving langsomt armlænet ned [24 på side 40].

- ➔ Låsen (23 på side 40) skal klikke hørbart på plads.
- ➔ Kontrollér, at den er låst korrekt. – Armlænet må ikke kunne løftes.

STØTTERULLER

Støttehjulene giver i visse situationer ikke tilstrækkelig sikkerhed mod, at kørestolen vælter.

Undgå at gøre følgende:

- At læne overkroppen kraftigt tilbage.

For at øge vippestabiliteten skal du altid køre med støttehjulene skubbet bagud.

For at øge vippestabiliteten bruges der et rør med et hjul [32 på side 41] på hver side.

Støtthjuls længde

For at indstille støtthjulets længde skal du trykke fjederhåndtaget (33 på side 41) indad og trække støtthjulet helt ud bagud for at køre.

SAMMENKLAPNING / UD- KLAPNING / MANUEL TRANSPORT

Grib ikke ind i komponenternes sakseområder for at folde dem sammen/ud. – Fare for at komme i klemme!

Den elektroniske rejsekørestol kan nemt foldes sammen til opbevaring eller transport, f.eks. i en bil [25 på side 40].

Sammenklapning

1. Sluk for den elektroniske rejsekørestol.
 - ➔ Tryk på tænd/sluk-knappen (6 på side 39<?>) for at slukke betjeningsmodulet.
2. Slå fodpladen ind [18 på side 40].
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Slå fodpladen op/ned* på side 17.
3. Træk foldelåsen bagud med den ene hånd (26 på side 41), og skub ryglænet fremad med den anden hånd.

Udklapning

4. Træk den sammenfoldede elektroniske rejsekørestol opad i ryglænet.
 - ➔ Derved foldes den elektroniske rejsekørestol ud.
5. Den elektroniske rejsekørestol er foldet helt ud, når foldelåsen (26 på side 41) går hørbart i hak.
 - ➔ Kontrollér, at foldelåsen er gået i hak, ved at skubbe ryglænet fremad. Den elektroniske rejsekørestol må i den forbindelse ikke foldes sammen.
6. Klap fodbrættet ned.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Slå fodpladen op/ned* på side 17.

Manuel transport

Den elektroniske rejsekørestol kan også bæres, mens den er foldet sammen.

- ➔ Tag batteripakken ud, når den elektroniske rejsekørestol skal bæres.
- ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Batteripakken* på side 18.
- ➔ For at forhindre, at den elektroniske rejsekørestol folder sig ud, når den bliver båret, kan der vikles et blødt burrebånd rundt om rammen og armlænsrøret (34 på side 40).

BATTERIPAKKEN

Batteripakken med litium-ion-batteriet kan tages ud [27 på side 41].

Udtagning af batteripakken

1. Parkér elektroniske rejsekørestolen i sikret tilstand.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Sikring af elektroniske rejsekørestolen* på side 10.
2. Træk låsegrebet (28 på side 41) fremad, og træk batteripakken fremad ud af holderen.

Indsætning af batteripakken

1. Sæt batteripakken ind i holderen.
 - ➔ Låsegrebet skal pege nedad ved indsætning, og batteripakken skal glide ind i styreskinnerne.
2. Skub batteripakken bagud, indtil du kan høre, at den klikker på plads.
 - ➔ Det må ikke være muligt at trække batteripakken ud fremad uden at trykke på låsegrebet.

Transport af elektronisk rejsekørestol med litium-ion-batterier

Beskyt litium-ion-batteriet mod temperaturer uden for det godkendte temperaturområde både under transport og opbevaring.

➔ Bemærk kapitel *Yderligere tekniske data for model 1.074* på side 33.

Det er tilladt at transportere de litium-ion-batterier, der er installeret i din elektroniske rejsekørestol, på vejen, med toget eller i luften.

Der findes dog forskellige regler for transporten af din elektroniske rejsekørestol. De afhænger af, hvor og hvordan den elektroniske rejsekørestol skal transporteres.

Før du rejser, skal du sørge for at finde ud af, hvilke nationale regler der gælder i dit hjemland og på din feriedestination for transport af litium-ion-batterier.

Indhent i givet fald oplysninger hos det pågældende transportselskab.

Individuelle transportfirmaer kan have retningslinjer, der begrænser eller forbyder transport.

Ved flytransport skal litium-ion-batteriet efter de nuværende regler fjernes fra din elektroniske rejsekørestol og medtages i håndbagagen.

- ➔ Få afklaret de specifikke transportbetingelser med dit flyselskab inden flyrejsen samt de lovbestemmelser vedrørende lufttransport, som gælder hhv. i dit oprindelsesland og på din feriedestination.
- ➔ Se venligst kapitlet *Udtagning af batteripakken* på side 18 om udtagning.
- ➔ Se kapitlet *Transport af litium-ion-batterier* på side 19.

Transport af litium-ion-batterier

Beskyt litium-ion-batteriet sådan, at hverken fugt eller fremmedlegemer (f.eks. små metaldele, søm eller andre ledende materialer) kan trænge ind i litium-ion-batteriets åbninger.

Kontakt din forhandler, før du sender eller transporterer et beskadiget litium-ion-batteri.

Sikkerhedsoplysninger om litium-ion-batterier

Litium-ion-batterier skal håndteres med stor omhu.

Fortsæt ikke med at bruge litium-ion-batterier, der er blevet tabt på gulvet, men få dem straks udskiftet af din forhandler.

Tabte litium-ion-batterier bør ikke opbevares i hjemmet.

Fortsæt ikke med at bruge defekte litium-ion-batterier, men få dem straks udskiftet af en forhandler.

Det er udelukkende det litium-ion-batteri, der er leveret af os, som må bruges.

➔ Litium-ion-batterier fra andre producenter kan forårsage personskader eller materielle skader.

Litium-ion-batterier må ikke beskadiges, ændres, opvarmes, brændes, kortsluttes, skilles ad eller nedsænkes i væsker.

Brug kun litium-ion-batteriet til betjening af din elektroniske rejsekørestol.

Beskyt litium-ion-batteriet mod temperaturer uden for det godkendte temperaturområde både under transport og opbevaring.

➔ Bemærk kapitel *Yderligere tekniske data for model 1.074* på side 33.

I det meget usandsynlige tilfælde af en overophedning eller brand af litium-ion-batteriet anbefaler vores batteriproducent, at der bruges rigeligt med vand eller sand til at slukke ilden.

Brug kun den medfølgende litium-batterioplader til at oplade litium-ion-batteriet.

Garantien er kun fuldt ud gyldig, hvis den batterioplader, vi har leveret, anvendes.

Fremmede opladere kan forårsage alvorlige skader på litium-ion-batteriet.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i nærheden af eller i forbindelse med brændbare væsker eller gasser.

Oplad aldrig litium-ion-batteriet i rum, hvor der kan komme fugt på den elektroniske rejsekørestol og/eller litium-ion-batteriet.

Efterlad aldrig den elektroniske rejsekørestol vedvarende tom, da dette kan beskadige litium-ion-batteriet.

Et fuldstændigt afladet litium-ion-batteri må ikke genoplades.

➔ Få litium-ion-batteriet udskiftet af forhandleren.

Oplad kun litium-ion-batteriet inden for det godkendte temperaturområde.

➔ Bemærk kapitel *Yderligere tekniske data for model 1.074* på side 33.

Litium-ion-batterier, der har været brugt i over tre år, bør udskiftes.

SIKKERHEDSSELE

Sørg for, at der ikke kommer nogen genstande i klemme under seleremmen!

Efterfølgende montering af et fastspændingsbælte må kun udføres på et autoriseret værksted!

Holdestroppen [29 på side 41] er ført rundt om sæderammen.

Fastspændingsbæltet tjener til at stabilisere siddepositionen og forhindrer, at man kan vælte forover ud af den elektroniske rejsekørestol, især hvis den elektroniske rejsekørestol bremser brat op.

Når sikkerhedsselen skal spændes, trækkes begge selens dele fremefter, og låsen skal gå hørligt i indgreb.

Tryk på de to clips (30 på side 41) og træk seleenderne fra hinanden for at åbne sikkerhedsselen.

➔ Sikkerhedsselen kan forlænges og må ikke sidde for stramt.

FLYTNING OG TRANSPORT

Elektroniske rejsekørestolen skal slukkes, inden den løftes!

Undlad at bruge ryglænet, benstøtterne eller armlænene til at løfte den elektroniske rejsekørestol med.

På-/aflæsning

Elektroniske rejsekørestolen kan på-/aflæses ved hjælp af en rampe eller en lift.

➔ Se sikkerhedsanvisninger og generel håndteringsvejledning til < *Elkøretøjer* > kapitlet < *Ramper og lifte* >. – Dette dokument og yderligere information findes i < *Information center* > på vores website < www.meyra.com >

Ramper og lifte

Bemærk rampens eller liftens betjeningsvejledning.

Bemærk rampens eller liftens producentspecifikationer.

Den maksimale pålæsningshøjde, som står anført på rampen, skal være større end højden (h på side 41) fra jorden op til lastfladen, f.eks. på en personbil.

Rampens eller liftens bæreevne skal være større end elektroniske rejsekørestolens tilladte totalvægt.

Når der bakkes op på ramper, er der fare for, at elkørestolen slår kolbøtter!

VEDLIGEHOLDELSE

Mangelfuld eller forsømt pleje og service af elektroniske rejsekørestolen fører til en begrænsning af garantien fra producenten.

Servicearbejde

Følgende serviceplan indeholder retningslinjer for udførelse af servicearbejde.

- ➔ Vedligeholdelsesplanen giver ingen oplysninger om det faktisk nødvendige arbejdsomfang, som er konstateret ved elektroniske rejsekørestolen.

Persontransport i motorkøretøjer

Din specialtilpassede elektroniske rejsekørestol er ikke godkendt som sæde til passagertransport i motorkøretøjer. – Læs mere i kapitel *Forklaring til mærkaterne på elektroniske rejsekørestolen* på side 34.

Transportsikring

Den aktuelle transportvirksomheds forskrifter og anvisninger skal følges. – Forhør dig om dem før transporten.

Den elektroniske rejsekørestol skal fastgøres i transportkøretøjet på en sådan måde, at den elektroniske rejsekørestol ikke udgør nogen fare.

- ➔ Fremgangsmåden til sikring af elektroniske rejsekørestolen fremgår af dokumentet < Sikkerhedsanvisninger og generel håndteringsvejledning til elkøretøjer > kapitlet < Transport i biler eller med transportmidler >. – Dette dokument og yderligere information findes i < Information center > på vores website < www.meyra.com >.

Serviceplan

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Inden kørsel	Generelt Kontrollér for fejlfri funktion.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper.
	Kontrol af magnetbremse Stil håndtaget til skift mellem køre-/skubbefunktion på kørefunktion i begge sider.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Hvis elektroniske rejsekørestolen kan skubbes, skal bremsen straks repareres af et sagkyndigt værksted. – Fare for uheld!
Hver 2. uge (afhængigt af samlet kørestrækning)	Stilleskruer Kontrollér, om skruer og møtrikker sidder godt fast.	Udfør kontrollen selv eller sammen med en hjælper. Stram de løsnede stilleskruer forsvarligt. Opsøg et autoriseret værksted efter behov.
Hver 2. måned (afhængigt af samlet kørestrækning)	Kontrol af hjul	Udfør visuel kontrol selv eller sammen med en hjælper. Kontakt et sagkyndigt værksted med henblik på reparation ved nedslidt dækprofil eller beskadigelse af dækkene.
Hver 6. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Kontrollér • Renhed. • Generel tilstand.	Se kapitlet <i>Rengøring</i> på side 28. Udfør dette alene eller sammen med en hjælper.
Hver 6-8. måned (afhængigt af samlet kørestrækning)	Hjulfastgørelse Kontrollér, at hjulmøtrikker eller -skruer sidder godt fast.	Udfør dette alene eller sammen med en hjælper. Spænd løsnede hjulmøtrikker eller -skruer, og efterspænd efter 10 driftstimer eller 50 km. Opsøg et autoriseret værksted efter behov.

Serviceplan

HVORNÅR	HVAD	BEMÆRKNING
Producentens anbefalinger: Hver 12. måned (alt efter, hvor ofte kørestolen bruges)	Eftersyn - Elektroniske rejsekørestol. - Oplader.	Foretages af forhandleren.

Dæk

Dækkene er lavet af en gummiblanding, der på nogle underlag kan efterlade spor, der kun vanskeligt eller slet ikke kan fjernes (bl.a. kunststof-, træ- eller parketgulve, tæpper, gulvbelægning). Vi hæfter ikke for skader på underlag på grund af slid eller kemiske processer på dækkene.

Hjul

Beskadigede hjul skal omgående erstattes af nye hjul af forhandleren.

➔ Udskift altid hjulene parvis.

To hjul [31 på side 41] med forskelligt slid påvirker den elektroniske rejsekørestols kørsel ligeud.

FEJLDIAGNOSE

Fejl eller oplysninger angives af batteridis-
playet og visningen af den maksimale slutha-
stighed.

Fejlvisning ved hjælp af batteriindi- katoren

I tilfælde af en *fejl* standses *elektroniske rej-
sekørestolen* for en sikkerheds skyld og lys-
segmenterne på batteriindikatoren (7 på
side 39<?>) *blinker hurtigt*. Antallet af
blinkende segmenter forklarer en mulig fejl-
kilde.

Gør principielt følgende for at afhjælpe fejl:

1. Sluk for betjeningsmodulet.
2. Udfør handlingen i kolonnen *Afhjæl-
ning*.
3. Tænd for betjeningsmodulet.

➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Tilslut-
ning af betjeningsmodul* på side 11.

➔ Hvis fejlen ikke kan afhjælpes og elektro-
niske rejsekørestolen ikke kan køre mere,
skal du kontakte et autoriseret, sagkyn-
digt værksted.

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
Betjeningsmodulets bat- terikontrol lyser ikke efter tilslutning.	Betjeningsmodul defekt	Skal repareres på sagkyn- digt værksted
	Stikforbindelsen til strøm- forsyningen er uden kontakt.	Kontrollér stikforbindelser.
	Batterierne er afladet for meget.	Skal repareres på sagkyn- digt værksted.
	Batteripakke mangler eller er ikke sat korrekt i.	Sæt batteripakken korrekt i.
Batteridisplayet på betje- ningsmodulet slukker, når der køres over en forhin- dring.	Batteristyringen har slået fra på grund af overbelastning.	Nulstil batteristyringen ved at: tilslutte opladeren. eller frakoble og indsætte batte- ripakken igen.
1 blinkimpuls	Batteriet er afladet.	Lad straks batterierne op, og kontrollér evt. batteritil- slutningerne.
2 blinkimpulser	Forbindelsen til højre motor er afbrudt.	Kontrollér motortilslut- ningskabel, -stik og motor.
3 blinkimpulser	Den elektriske ledning til den højre motor er defekt (kortslutning).	Kontrollér motortilslut- ningskabel, -stik og motor.

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
4 blinkimpulser	Forbindelsen til venstre motor er afbrudt.	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
5 blinkimpulser	Den elektriske ledning til venstre motor er defekt (kortslutning).	Kontrollér motortilslutningskabel, -stik og motor.
7 blinkimpulser	En system- eller joystickfejl.	Rør ikke ved joysticket under tilkoblingsfasen. – Sluk for elektroniske rejsekørestolen, og tænd igen.
7 blinkende impulser og indikatoren for maksimal tophastighed lyser	En system- eller joystickfejl.	Kontrollér betjeningsmodulkablet for skader, kontrollér kabelforbindelserne. – Få betjeningsmodulet udskiftet.
8 blinkimpulser	Betjeningsmodul eller elektronik defekt eller systemfejl.	Kontrollér kabel og tilslutningsstik. – Sluk for elektroniske rejsekørestolen, og tænd igen.
9 blinkimpulser	Driftsforstyrrelse på motorens magnetbremses.	Stil håndtaget til køre-/skubfunktion på kørsel.
10 blinkimpulser	Batterispændingen er for høj (kørsel ned ad bakke).	Kør kun meget langsomt ned ad bakke, og kontrollér evt. batteritilslutningerne.
Løbende lys op/ned	Joysticket er flyttet for tidligt.	Slip joysticket.
Løbende lys opad	Lader tilsluttet	Træk laderen ud efter opladningen.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

De nærværende sikkerhedsanvisninger er et udtræk af *Sikkerhedsanvisninger og generelle betjeningsanvisninger*, som kan findes på vores internetside: < www.meyra.com >.

Stik ikke fingrene ind i åbne rammerør. – Risiko for tilskadekomst!

Under anvendelse af elektroniske rejsekørestolen, også ved tilstand og især på stigninger/skråninger, skal man indtage en sikker siddestilling. – Fare for uheld!

For at opnå en sikker siddeposition skal brugerens ryg flugte med rygpulstringen og brugerens bækken sidde helt tilbage på sædet.

En forflytning fra elektroniske rejsekørestolen på stigninger/skråninger må kun i nødstilfælde ske med hjælp fra en ledsager og/eller hjælper! – Fare for uheld!

Du bør ikke ryge under brugen af elektroniske rejsekørestolen.

Ved direkte sollys, kan sædebetræk/puder, armlænsputer, benstøtter og håndtag opnå temperaturer på over 41 °C. – Der er fare for tilskadekomst ved kontakt med ubeskyttet hud! Undgå en sådan opvarmning af elektroniske rejsekørestolen ved altid at parkere den i skyggen.

Der er ikke defineret specielle monteringspunkter til fastgørelse af genstande, der skal medtages. – Små dele kan opbevares i redskabstasken.

Ved fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed kræves der en køreevneattest til selvstændig styring af en elektroniske rejsekørestolen.

Der må stiges hhv. ind i og ud af sædet, når elektroniske rejsekørestolen er slukket og indstillingshåndtaget køre-/skubbe-funktion er sat på kørefunktion!

I modsat fald kan en utilsigtet berøring af joysticket sætte elektroniske rejsekørestolen i gang! – Fare for uheld!

Rammekomponenterne og fodpladen på din elektroniske rejsekørestol er fremstillet i kulfiberforstærket plast (carbon) med høj styrke.

Overbelastning, f.eks. hvis elektroniske rejsekørestolen tabes eller på grund af en ulykke, kan medføre en ikke synlig skade (brud) af kulfibrene. – Undgå stød og slag, som går ud over almindelig brug.

Når en elektroniske rejsekørestol er blevet tabt eller efter en ulykke bør du få kørestolen kontrolleret af din fagforhandler.

Beskadigede kulstofkomponenter bør ikke længere bruges.

Få hurtigst muligt beskadigede kulstofkomponenter skiftet ud.

Det er ikke tilladt at påmontere yderligere påmonteringer på kulstofdelene ved at klemme eller skrue dem på.

Ændringer ved kulstofdelene, f.eks. ved at bore huller, skære dele af e.l., er ikke tilladt.

Ledsager

Ledsageren skal gøres opmærksom på alle evt. faresituationer, før han/hun begynder at hjælpe. De komponenter på din elektroniske rejsekørestolen, som ledsageren skal tage fat i, skal sidde forsvarligt fast.

Udstigning fra elektroniske rejsekørestolen

Kør elektroniske rejsekørestolen så tæt som muligt på det sted, hvor du vil stige ud af elektroniske rejsekørestolen.

➔ I den forbindelse skal anvisningerne i kapitel *Sikring af elektroniske rejsekørestolen* på side 10 og *Fodbræt* på side 17 følges.

- ➔ Vi anbefaler, at udstigningen af elektroniske rejsekørestolen sker med en person til assistance.

Opsamling af genstande

Undgå at hælde overkroppen langt fremad, til siden eller bagud, især ved opsamling eller aflægning af tunge genstande. – Risiko for, at den elektroniske rejsekørestol vælter eller tipper, især ved høj sædehøjde (sædepude)!

Kørsel på skråninger, stigninger eller skrånende kørebane

Fra en bestemt kørebanehældning er væltetsikkerheden og bremse- og styrefunktion betydeligt nedsat på grund af reduceret vejgreb.

- ➔ Se kapitlet *Tekniske data* på side 31.

Læn dig aldrig til den lave side af skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Undgå ændringer i køretilstanden i ryk (især ved kritisk indstillede kørselsparametre som f.eks. store forsinkelser).

Kør altid med lav hastighed, når du kører ned og op ad bakke.

Ekstreme stigninger og nedkørsler skal køres med tilpasset sluthastighed.

Undlad at skifte til skubbefunktion på stigninger og nedkørsler. De automatiske bremsere fungerer ikke i skubbefunktion.

Skub ikke elektroniske rejsekørestolen på nedad- eller opadgående terræn.

Der er fare for at vælte ved kørsel i sving og ved vending på stigninger og nedkørsler.

Undgå at køre på opad- eller nedadgående terræn med utilstrækkelig vejbanebeskaffenhed. Selv ved halvsides is-, vand-, mosbelægninger eller lignende på kørebanen er der fare for, at elektroniske rejsekørestolen mister sit vejgreb og skrider ukontrolleret. Sæt i givet fald straks joysticket i neutral position.

Kør aldrig hurtigere end fodgængerhastighed.

Den bremsekraft, der kan overføres til kørebanen, er væsentligt mindre ved kørsel ned ad bakke end på lige vej og forringes yderligere ved dårligere vejforhold (f.eks. vådt føre, sne, grus, tilsmudsning). En farlig udskridning af de bremsede hjul og en dermed forbundet uønsket kursafvigelse skal udelukkes ved at bremse forsigtigt og kontrolleret.

For enden af bakken skal du passe på, at fodpladerne ikke berører jorden og dermed skaber en faresituation som følge af pludselig opbremsning.

Køreunderlag med sidehældning (f.eks. fortovej med sidehældning) bevirker, at din elektroniske rejsekørestol vil dreje mod den lave side. Dette skal du selv eller en ledsager udligne ved at styre modsat.

Forcering af forhindringer

Støttehjulene skal skubbes ind, når man kører hen over forhindringer. Støttehjulene risikerer at ramme jorden, mens forhindringen skal overvindes, og at gøre det umuligt at manøvrere med kørestolen.

Når forhindringer er overvundet, skal eventuelle støtthjul, der er skubbet ind, trækkes ud igen.

Muligheden for at komme hen over forhindringer afhænger bl.a. af kørebanens hældning.

Enhver forcering af en forhindring udgør en risiko! – Fare for, at elektroniske rejsekørestolen vipper.

Forcering af en forhindring er en særlig risikosituation, hvor der bl.a. skal tages hensyn til en kombination af sikkerhedsanvisninger vedrørende skråninger og køreunderlag med sidehældning.

Kør så vidt muligt uden om forhindringer, som f.eks. sporriller, skinner, kloakdæksler eller lignende farekilder.

Kør altid hen imod mindre forhindringer, f.eks. afsatser/kanter langsomt og i ret vinkel (90°). Kør hen over forhindringen fremadkørende med ca. 0,5 m tilløb og begge hhv. for- og baghjul samtidig. I modsat fald kan din elektroniske rejsekørestol hælde på tværs og vælte dig ud af elektroniske rejsekørestolen.

Hold så stor en sikkerhedsafstand til afgrunde, trapper, skråninger, bredder osv., at der er tilstrækkelig plads til at reagere, bremse og vende.

Hvis det er muligt, skal du få en eller flere hjælpere til at løfte dig ud af elektroniske rejsekørestolen og bære dig hen til det ønskede sted.

Når man kører ned ad et trin (f.eks. en fortovs kant), kan man let falde ud af den elektroniske rejsekørestol, hvis fodpladen rører ved fortovet. Når man skal krydse spor eller sporriller, er det nødvendigt med øget opmærksomhed. – Utsigtet afvigelse fra kursen!

Med gængse elektroniske rejsekørestole er det ikke sikkert at køre på trapper.

Elektrisk anlæg

Forkerte og/eller upassende ændringer i køreegenskaberne kan påvirke elektroniske rejsekørestolens og elektroniske rejsekørestolsbrugerens sikkerhed. – Fare for uheld!

Den elektroniske styring af en elektroniske rejsekørestol må ikke modificeres.

Såfremt elektroniske rejsekørestolen reagerer usædvanligt eller udfører ukontrollerbare køremanøvrer, skal joysticket uopholdeligt bringes i neutral stilling, og/eller elektroniske rejsekørestolen skal straks slukkes.

Befordring i offentlige transportmidler

Din elektroniske rejsekørestol er ikke beregnet til personbefordring i offentlige transportmidler. Det kan medføre begrænsninger. Vi anbefaler, at der benyttes et sæde, der er indbygget i befordringsmidlet.

Hvis siddende befordring i elektroniske rejsekørestolen alligevel skulle være uomgængeligt nødvendig, skal følgende overholdes:

- Benyt den plads, som trafikselskabet har bestemt til frasætning.
- Overhold trafikselskabets forskrifter, før du parkerer elektroniske rejsekørestolen.
- Parkér din elektroniske rejsekørestol mod kørselsretningen på den afsete plads.
- Elektroniske rejsekørestolen skal placeres således, at ryglænet kan støtte mod begrænsningen af den afsete plads.
- Den ene side af elektroniske rejsekørestolen skal desuden flugte med en ekstra begrænsning af den afsete plads, så elektroniske rejsekørestolen ikke kan skride under et uheld eller en pludselig bremsemanøvre.

Kørsel i offentlig trafik

Overhold de nationale gældende forskrifter vedrørende kørsel på offentlige veje og spørg i givet fald din autoriserede forhandler efter det nødvendige tilbehør.

- ➔ Hvis du har fysiske begrænsninger som f.eks. blindhed, er det ikke tilladt selv at styre din elektroniske rejsekørestol.

Rengøring

Elektroniske rejsekørestolen må ikke spules med højtryksrensere! – Fare for kortslutning!

Kulstofkomponenter må ikke rengøres med opløsningsmidler, opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler, alkohol eller acetone.

Polstringer og betræk er som regel forsynet med plejeanvisninger (plejeskilt).

- ➔ Bemærk kapitel *Symbolforklaring til vaskEANvisningerne* på side 34.

Ellers gælder følgende anvisninger:

- ➔ Rengør puderne med varmt vand og opvaskemiddel.
- ➔ Pletter kan fjernes med en svamp eller en blød børste.
- ➔ Vask genstridige pletter ved at anvende et almindeligt vaskemiddel.
- ➔ Må ikke vaskes! Undlad vask i vaskemaskine!

Skyl med rent vand, og lad det tørre.

Stellet og hjulene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel. Derefter tørres omhyggeligt.

- ➔ Kontrollér stellet for korrosionsskader samt andre skader.
- ➔ De syntetiske materialer må kun rengøres med varmt vand og neutralt rengøringsmiddel eller brun sæbe.
- ➔ Hvis der anvendes et almindeligt kunststofrengøringsmiddel, skal producentens anvisninger følges.

Belysningsudstyret skal altid holdes rent, og dets funktionsdygtighed skal kontrolleres, før kørsel påbegyndes.

- ➔ De elektriske komponenter skal beskyttes mod vand og fugt!
 - Fare for beskadigelse af elektronik og betjeningsfelt ved strålevand.

Ved pleje bør der anvendes silikonefri rengørings- og plejemidler på vandbasis.

- ➔ Følg producentens anvisninger for produktet.

Brug ikke aggressive rengøringsmidler, såsom opløsningsmidler eller hårde børster etc.

Yderligere oplysninger om rengøring og pleje finder du i < *Information center* > på vores website:

< www.meyra.com >.

Behandlet overflade

Der er bedst mulig beskyttelse imod korrosion på grund af en speciel overfladebehandling.

Hvis de bevægelige dele af og til smøres med lidt olie, forlænges deres funktion.

Desinficering

Kulstofkomponenter må ikke rengøres med opløsningsmidler, opløsningsmiddelholdige desinfektionsmidler, alkohol eller acetone.

Hvis produktet benyttes af flere personer (f.eks. på plejehjem), skal der anvendes et almindeligt desinficeringsmiddel.

- ➔ Før desinficeringen skal polstringer og håndtag rengøres.
- ➔ Det er tilladt at spraye eller aftørre med godkendte og anerkendte desinfektionsmidler.

Oplysninger om kontrollerede og anerkendte desinfektionsmidler og -procedurer kan fås af din nationale myndighed for sundhedsbeskyttelse.

- ➔ Ved anvendelse af desinfektionsmidler kan der forekomme skader på overflader, hvilket kan forringe komponenternes funktion på længere sigt.
- ➔ Følg producentens anvisninger for produktet.

Reparation

Reparationer må principielt kun gennemføres af autoriserede forhandlere.

Istandsættelse

Ved udførelse af reparationsarbejde kan du have fuld tillid til din forhandler. Han/hun er blevet instrueret i udførelsen af dette arbejde.

Service

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din forhandler, der kan rådgive dig samt udføre service og reparation.

Reservedele

Sikkerhedsrelevante dele eller moduler må kun monteres af et sagkyndigt værksted. – Fare for uheld!

Reservedele kan udelukkende fås hos forhandleren. I tilfælde af reparation må der kun anvendes originale reservedele!

➔ Komponenter fra andre firmaer kan forårsage fejl.

En reservedelsliste med de tilhørende artikelnumre og tegninger ligger hos forhandleren.

For at få leveret de rigtige reservedele er det altid nødvendigt også at angive kørestolens serie-nr. (SN)! Nummeret står på typeskiltet.

Ved enhver ændring/modificering af elkørestolen foretaget af den autoriserede forhandler skal kørestolens betjeningsvejledning vedlægges supplerende information, såsom monterings-/betjeningsanvisninger. Dato for ændringer skal registreres og anføres ved reservedelsbestillinger.


På denne måde forebygges fejlbestillinger ved senere reservedelsbestillinger.

Anvisninger vedrørende længere brugspauser

Ved længere pauser i anvendelsen er følgende foranstaltninger nødvendige:

- ➔ Oplad batteripakken hver 2. måned, og køр derefter med den elektroniske rejsekørestol i minimum 20 minutter.
- ➔ Oplad derefter batteripakken helt.
- ➔ Tag batteripakken ud.
 - ➔ Bemærk i den forbindelse også hhv. kapitel *Batterioplading* på side 15 og *Batteripakken* på side 18.
- ➔ Opbevaringstemperaturerne skal overholdes.
 - ➔ Følg anvisningerne i kapitlet *Tekniske data* på side 31.

BORTSKAFFELSE

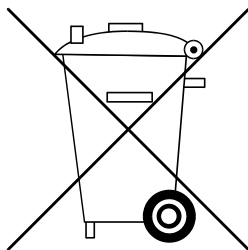

Bortskaffelse skal ske i henhold til nationalt gældende lovbestemmelser.

Kontakt kommunen for oplysninger om den lokale miljøstation.

Kulstofkomponenter skal bortskaffes særskilt eller kan afleveres til genbrug via os.

ANVISNINGER TIL BRUG FOR FORHANDLEREN

Der kan rekvireres en vedligeholdelses- og servicemanual, som bl.a. indeholder følgende oplysninger:

1. Indstillinger, som kan udføres ved hjælp af værktøj.
2. Procedurebeskrivelser ved vigtige reparationer.
3. Bemærkninger om modelspecifikke ændringer.
4. En tjekliste til det årlige eftersyn.

Tjeklisten indeholder de funktionskontroller, der er nødvendige i forbindelse med eftersyn.

De indeholder retningslinjer for, hvordan inspektionsarbejdet skal udføres.

- ➔ Listen giver dog ingen oplysninger om den reelle og nødvendige pleje, køretøjet behøver.

Når den årlige inspektion er udført korrekt, skal dokumentationen for udført inspektion udfyldes i betjeningsvejledningen.

En skabelon til yderligere eftersynsdokumentation kan ved behov kopieres fra service- og vedligeholdelsesvejledningen. Den skal i så fald vedlægges betjeningsvejledningen.

Programmering af køreegenskaber

Elektroniske rejsekørestolens køreegenskaber kan indstilles via en programmeringsenhed.

- ➔ Bemærk den pågældende < service- og vedligeholdelsesvejledning >.

Elektroniske rejsekørestolens køreegenskaber bør regelmæssigt tilpasses til de individuelle krav og den pågældende brugers indlæringsfremskridt.

- ➔ Programmeringen skal være tilpasset specielt til brugeren. Der skal tages højde for reaktionsevnen, helbredstilstanden samt fysiske og psykiske evner. Samråd med lægen eller terapeuten kan være en stor hjælp i denne forbindelse.

- ➔ Enhver ændring ved den fra fabrikkens side indstillede programmering kan udgøre en øget risiko for ulykker.

- ➔ Mulig fare for at vælte.

TEKNISKE DATA

Alle angivelser under < Tekniske data > gælder standardmodellen.

Måletolerance ± 15 mm, $\pm 2^\circ$.

Beregning af den maks. brugervægt:

Den tilladte samlede vægt fremkommer ved beregning af elektroniske rejsekørestolens egenvægt og den maksimale bruger-/ (person-) vægt.

Yderligere vægt pga. senere påmonterede dele eller bagage reducerer den maks. brugervægt.

Eksempel:

En bruger vil tage bagage på 5 kg med. Dermed reduceres den maks. brugervægt med 5 kg.

Rækkevidde

Rækkevidden afhænger i høj grad af følgende faktorer:

- Batteritilstand
- Førervægt
- Kørehastighed
- Køreadfærd
- Kørebanens beskaffenhed
- Kørebetingelser
- Omgivelsestemperatur.

De oplyste nominelle data er realistiske under følgende omstændigheder:

- Omgivelsestemperatur 27 °C.
- 100 % nominel kapacitet på drivbatterier ifølge DIN-standard.
- Nye eller tilsvarende gode batterier med mere end 5 opladningscykluser.
- Nominel belastning på 100 kg.
- Uden gentagen acceleration.
- Plant, fast underlag.

Rækkevidden indskrænkes stærkt af:

- Hyppig opadgående rampekørsel
- Dårlig ladekapacitet på batterierne
- Lave omgivelsestemperaturer.
- Hyppig opstart og opbremsning (f.eks. i indkøbscentre)
- Ældede, sulfaterede batterier
- Tvungne nødvendige, hyppige styremålinger
- Nedsat kørehastighed (især ved fodgængerhastighed).

I praksis reduceres den rækkevidde, som fortsat kan opnås under "normale betingelser", til ca. 80 – 40 % af den nominelle værdi.

Køreegenskaber ved forcering af stigninger

Stigninger og strækninger med fald, der overstiger de tilladte værdier, må der af sikkerhedsmæssige årsager kun køres på uden fører (f.eks. ved ramper)!

Anvendte standarder

Den elektroniske rejsekørestol er i overensstemmelse med standarden:

- EN 12184
- ISO 7176-8

Modellen er kategoriseret i anvendelsesklasse A iht. DS/EN 12184.

Vores anvendte moduler og komponenter opfylder EN 1021-2 for bestandighed over for antændelse.

Specifikationer i overensstemmelse med ISO 7176-15 for model 1.074

	min.	maks.
Total længde	923 mm	923 mm
Total bredde	570 mm	570 mm
Total højde	930 mm	930 mm
Brugermasse (inkl. nyttelast)	120 kg	120 kg
Totalmasse	140 kg	140 kg
Faktisk sædedybde	420 mm	420 mm
Faktisk sædebredde	450 mm	450 mm
Sædefladens højde ved forkanten (uden sædepude)	500 mm	500 mm
Sædevinkel	5°	5°
Benvinkel	106°	–°
Ryglæsvinkel	16°	16°
Ryghøjde	460 mm	460 mm
Fodplade hen til sæde (underbenets længde)	430 mm	430 mm
Armlæns højde fra siddeflade	240 mm	260 mm
Ryglæn til forkant af armlæn	360 mm	360 mm

	min.	maks.
Overvindelse af forhindringer	40 mm	40 mm
Min. venderadius	640 mm	640 mm
Tophastighed ved fremadkørsel	6 km/t	6 km/t
Korteste bremsevej fra tophastighed	1000 mm	1000 mm
Rækkevidde med litumbatterier	– km	12 km
Nominel stigning		
Statisk stabilitet nedkørsel	6°	6°
Statisk stabilitet opkørsel	6°	6°
Statisk stabilitet sidelæns	6°	6°
Dynamisk stabilitet opkørsel	3,5°	3,5°

Yderligere tekniske data for model 1.074

	min.	maks.
Støjniveau		62 dB(A)
Kapslingsklasse		IP x4
Vendeplads	980 mm	– mm
Drevstyring		24 V / 35 A
Fremdrifteffekt (6 km/t)	2x 250 W	2x 250 W
Nyttelast	– kg	2,2 kg
Akselbelastning foran	– kg	30 kg
Akselbelastning bagpå	– kg	130 kg
Frihøjde, motor		70 mm
Egenvægt (med batteripakke)	– kg	17,8 kg

	min.	maks.
Egenvægt (uden batteripakke)	– kg	16 kg
Transportmål		
Længde	950 mm	950 mm
Bredde	570 mm	570 mm
Højde	370 mm	370 mm
Klimatekniske oplysninger		
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C	
Opbevaringstemperatur med drivbatterier (maks. 1 år)	-20 °C til +45 °C	
Opbevaringstemperatur uden drivbatterier	-40 °C til +65 °C	
Svinghjul		
178 x 45 mm (7" x 13/4")		punkterfri
Drivhjul		
215 x 50 mm (8" x 2")		punkterfri
Drivbatterier		
1 x 24 V 12 Ah	Lithium-ion-batteriet	
Energimængde		288 Wh
Maks. batterimål (LxBxH)	330 x 100 x 110 mm	
Ladestrøm, opladertype: QL-09005-B2402000F		2 A
Ladetemperatur	0 °C til +45 °C	

Symbolforklaring til vaskeanvisningerne

(symbolerne er i overensstemmelse med europæisk standard)



Finvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C.



Normalvaskeprogram ved den angivne maksimale vasketemperatur i °C.



Håndvask



Må ikke udsættes for blegemidler.



Ikke egnet til tørretumbler.



Må ikke stryges.




Må ikke kemisk renses.

Forklaring til mærkaterne på elektroniske rejsekørestolen



Læs betjeningsvejledninger og vedlagt dokumentation.

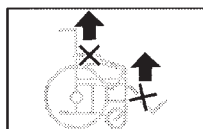

Løft ikke elektroniske rejsekørestolen i armlæn eller benstøtte.


Kørestolen må ikke løftes i dele, der kan afmonteres.



Kørefunktion



Skubbefunktion (skub kun kørestolen på plant underlag)

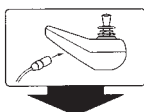

Oplysning om opladningsstik



Produktet er **ikke** godkendt som sæde i bil.



Advarsel om klemningsfare ved sammenfoldning. Lås låsen op, før den elektriske rejsekørestol foldes sammen.



Advarsel om klemningsfare ved drejning af armlænet. Tryk på knappen for at svinge armlænet.



Træk støttehjulene tilbage indtil stopanslaget, før du kører. – Der er fare for, at du vælter.

Forklaring til symbolerne på typeskiltet



Producent



Bestillingsnummer



Serienummer



Produktionsdato



Till. brugervægt



Till. totalvægt



Till. akseltryk



Till. stigning



Till. fald

max. ... km/h

Till. maks. hastighed



Produktet er godkendt som sæde i bil.



Maks. tilladt bruger-
vægt, når produktet
er godkendt som
sæde i et motorkø-
retøj.



Produktet er **ikke**
godkendt som sæde
i bil.



Medicinsk udstyr

ANSVAR/GARANTI

Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen samt uprofessionel udførelse af vedligeholdelsesarbejde og især af tekniske ændringer og udvidelser (påmonterede dele) uden vores samtykke medfører bortfald af såvel ansvars- og garantikrav som af almindeligt produktansvar.

Nationale ansvars- / garantibetingelser mellem dig og din fagforhandler kan afvige fra de i kapitlet angivne betingelser.

For dette produkt påtager vi os det lovpligtige ansvar som en del af vores generelle forretningsbetingelser samt evt. øvrige udspecificerede/aftalte garantier. I forbindelse med krav om ansvar og garanti bedes du kontakte din forhandler medbringende følgende ANSVARS-/GARANTIKUPON samt de nødvendige oplysninger om model, følgeseddel-nr. med leveringsdato og serienummer (SN).

Serienummeret (SN) kan aflæses på typeskiltet.

Anerkendelse af ansvars- og garantikrav forudsætter altid en korrekt anvendelse af produktet, anvendelse af originale reservedele fra forhandlere samt regelmæssig udførelse af vedligeholdelse og kontrol.

Garantien dækker ikke skader på overfladen, hjulenes slanger og dæk, beskadigelser som følge af løsnede skruer eller møtrikker, ødelagte fastgøringshuller som følge af hyppigt monteringsarbejde.

Garantien dækker heller ikke skader på drev og elektronik som følge af usagkyndig rengøring med dampstråleudstyr eller som følge af, at komponenterne forsætligt eller uforsætligt er blevet udsat for vand.

Fejl på grund af strålingskilder som f.eks. mobiltelefoner med stor sendeeffekt, HiFi-anlæg og andre kraftige støjkluder uden for normspecifikationerne kan ikke gøres gældende som ansvars- eller garantikrav.

Denne betjeningsvejledning skal som en integreret del af produktet medgives ved bruger- eller ejerskifte.

Evalueringen af vore produkter kan ske ved hjælp af vores < Information center > (info-center) Område < PMS > på vores hjemmeside < www.meyra.com >.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med fremskridt for øje.



Produktet opfylder kravene i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

KONTROLDOKUMENTATION

Køretøjets data:

Model:

Følgeseddel-nr.:

Serie-nr. (SN):

Anbefalet sikkerhedskontrol 1. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 2. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 3. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 4. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Anbefalet sikkerhedskontrol 5. år (senest efter 12 måneder)

Specialforhandlerstempel:

Underskrift: _____

Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

Ansvars-/garantikupon

Bedes udfyldt! Kan efter behov kopieres, og kopien sendes til forhandleren.

Ansvar/garanti

Modelbetegnelse:

Følgeseddel-nr.:

SN (se typeskiltet):

Leveringsdato:

Forhandlerens stempel:

Kontrolokumentation ved overdragelse

Køretøjets data:

Serie-nr. (SN):

Model:

Følgeseddel-nr.:




Specialforhandlerstempel:



Underskrift: _____


Sted, dato: _____

Næste sikkerhedskontrol om 12 måneder

Dato: _____

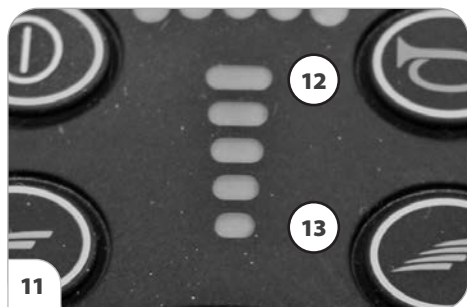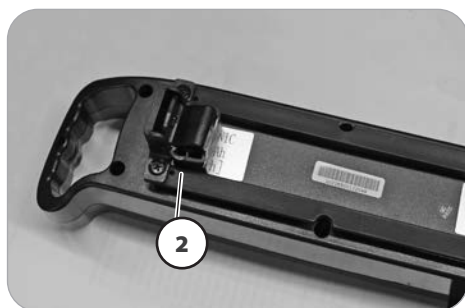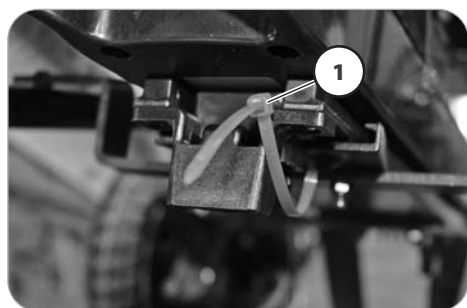


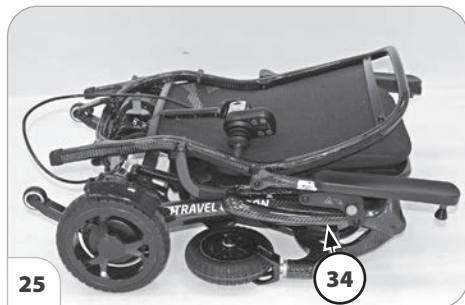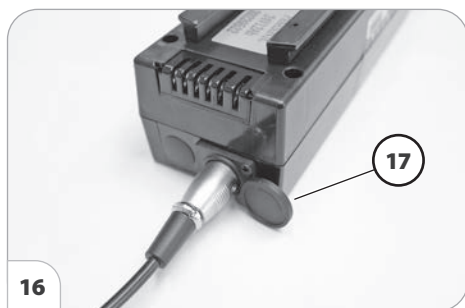

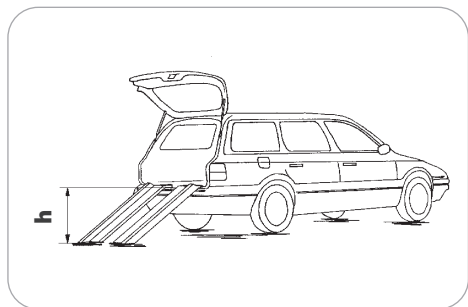



Din forhandler

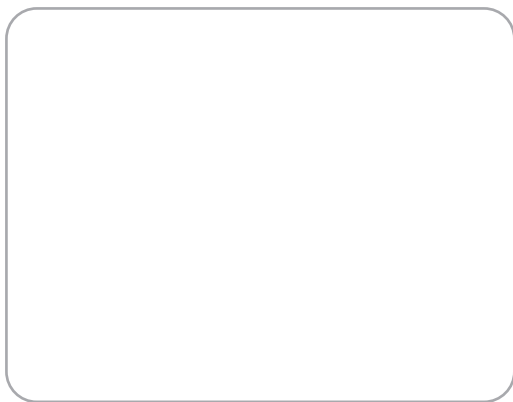

Original
Betjeningsvejledning

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Tyskland
info@meyragroup.com | Tel.: +49 571 93292 - 311 | Fax: +49 571 93292 - 9311 | www.meyra.de

2025-06 Vi forbeholder os tekniske ændringer af vores produkter samt trykfejl i vores tryksager.
Del-nr. 205 351 306